













Gnathoflex estético

16	14 <sup>1</sup> / <sub>5</sub>	24 <sup>4</sup> / <sub>5</sub>	26	Diente
				tamaño <b>D</b>
				tamaño <b>C</b>
				tamaño <b>B</b>

**Surtido**














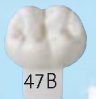

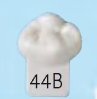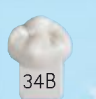
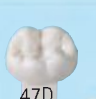







36 piezas  
(12 formas diferente en  
tamaños B, C, D)

**REF 429 A003 6**

Marque por favor aquí   
la cantidad deseada de  
surtidos.

Marque la cantidad deseada de  
la pieza en el cuadrante corres-  
pondiente.

Imagen a tamaño original.

								tamaño <b>B</b>
								tamaño <b>C</b>
								tamaño <b>D</b>
<b>47</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	Diente

Remitente (Sello):

Nº de cliente

Siguiente pedido:

Fecha, Firma

## Gnathoflex estético



**Moldes de silicona altamente flexibles y reutilizables para modelar superficies masticatorias en cera, resina y cerámica.**

Por medio de la preforma de teflon de silicona realizará en segundos una cara oclusal.

- Multiusos - la superficie lisa por la capa de teflon.
- Una adquisición única.
- Gnathoflex Estético siempre se puede reutilizar.

Sáquele más partido a su trabajo, invirtiendo menos tiempo, con una calidad constante.



1 El Gnathoflex de silicona especial es estable en sus dimensiones y a la temperatura hasta los 250°C. La forma del antagonista se transfiere a través del molde de tan solo 0,5 mm de espesor.



2 La flexibilidad del Gnathoflex garantiza una estabilidad de forma exacta y una larga vida útil.



3 Las cúspides los surcos del Gnathoflex son reproducidos con toda precisión en cera, material sintético o cerámico. A su vez se obtendrá una superficie lisa y de alto brillo.

40 seg para una superficie masticatoria en cera

90 seg para una superficie masticatoria en resina

180 seg para una superficie masticatoria en cerámica



4 La forma funcional estética del Gnathoflex en el puente de cera se podrá modificar individualmente.



5 Con cualquier resina o composite se consigue una superficie con brillo. Ideal para puentes provisionales.



6 La estratificación individual según colores y forma, y también conforme a sus deseos personales, será siempre posible. La masa cerámica se podrá seleccionar libremente.



7 Realizar las cofias como de costumbre en cera o resina.



8 Rellene el Gnathoflex con su cera para modelar.

**Usted lo podrá utilizar también como molde básico para la modelación individual suya en el laboratorio.**



9 Tan pronto como la cera empiece a solidificarse se



10 aplicará el Gnathoflex en colocará la cofia.

**El articulador se separará, en la respectiva superficie masticatoria, en unos 0,5 mm para compensar el espesor del Gnathoflex.**

**Elija a su gusto: Contacto multipunto en articulación exacta, con contacto mínimo ó 0,5 mm exactos fuera de contacto**



1 Cerrar el articulador y conectar la superficie masticatoria con la cofia mediante una gotita de cera.



2 Proceder de igual manera con la segunda corona de anclaje del puente.



3 Reproducción de alto brillo y fiel al original de la forma de silicona en cera.



4 Como base para la superficie masticadora del elemento intermedio se utiliza una pieza auxiliar de cera.



5 El lado oclusal listo del puente completo. Una presentación uniforme de la estética del Gnathoflex.



6 La colisión de los antagonistas con el puente de cera desde el lado lingual.



7 La vista bucal nos presenta lo contactos centrales de la relación cúspide-fosa.



8 Los contactos de oclusión del puente con los antagonistas visualizados mediante papel de articular.

# El modelado de la estructura

## Gnathoflex estético

### Superficies masticatorias con cualquier material sintético sin necesidad de trabajos suplementarios



9 En el armazón preparado de manera normal se aplicará el material acrílica K y B (dentina).



10 El Gnathoflex se rellenará sin aislamiento alguno primeramente con el material de borde y luego con la dentina. La pieza se aplicará en el puente.



11 Cerrar el articulador. Tratándose de materiales sintéticos endurecibles por luz de halógeno se podrá empezar ahora con la polimerización para fijar la oclusión.



12 A continuación se retirará el puente, se aplicarán los puntos de contacto y se procederá al polimerizado definitivo. Tan solo después se retirarán los moldes de silicona.

### Superficies masticatorias de cerámica con colores exactos, más fáciles que nunca



13 El puente cerámico preparado con el opacador se configurará con dentina. La pieza de silicona se reparará luego con una capa delgada de aislamiento cerámico Gnathoflex.



14 Rellenar el Gnathoflex primeramente con el material de borde y luego con dentina. En esta operación, distribuir el material de borde desde las cúspides hacia el borde. Tratándose de cerámica, el articulador se tendrá que separar en algo más que 0,5 mm a fin de compensar la contracción.



15 Aplicar el Gnathoflex y establecer la conexión con el armazón mediante masa cerámica. La modelación restante se efectuará con el material de borde, dentina o una mezcla de material de borde/dentina - según el color del diente.



16 Secar la masa cerámica con vellón y un soplador de aire caliente. Retirar ahora el Gnathoflex con cuidado. Después de ello se podrá levantar el puente, aplicar los puntos de contacto y proceder a la cocción normal.

Accesorio:



**Isoflex**  
20 ml  
REF 540 0101 3

## Gnathoflex estético




Por medio de la preforma de teflon de silicona realizará en segundos una cara oclusal.

- Multiusos - la superficie lisa por la capa de teflon.
- Una adquisición única.
- Gnathoflex Estético siempre se puede reutilizar.

Sáquele más partido a su trabajo, invirtiendo menos tiempo, con una calidad constante.

- Para la modelación en cera.
- Para cerámica.
- Para resina.

## Gnathoflex Premium

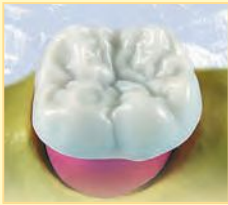

**Formas de silicona altamente flexibles, recuperables para crear superficies oclusales.**  
Entre 40 a 180 segundos para crear una superficie gnatológica, estética y funcional para cera, resina y cerámica.



**Gnathoflex**  
**Surtido de modelos de estudio FF1**  
1 Modelo sup.  
1 Modelo inf.  
REF 992 5027 3

tamaño original



**Gnathoflex**  
**Surtido de modelos de estudio mini FF1**  
1 Modelo sup.  
1 Modelo inf.  
REF 992 5027 4

tamaño original



**Surtido**  
**Surtido Gnathoflex Premium**  
48 piezas, consta de 16 formas diferentes en 3 tamaños A-B-C  
REF 429 P004 8



**Isoflex - if**  
20 ml  
REF 540 0101 3

## Gnathoflex Premium

### Superficies oclusales en cera



1 Crear la cofia de cera o resina como de costumbre.



2 Para compensar el grosor de la pieza del Gnathoflex de 0,5 mm, se elevará la mordida solo por ese grosor.



3 Rellenar la preforma de Gnathoflex con cera y esperar hasta que esté en la fase de solidificación.



4 Una vez que haya comenzado a solidificar la cera, colocar la preforma del Gnathoflex sobre el muñón.



5 6 Cuando esté en posición de máxima intercuspidad, cerrar el articulador y sellar la preforma a la cofia con una gota de cera. Según la situación del trabajo se podrá colocar varias preformas de Gnathoflex de seguida o una detrás de la otra. Al poder variar el vástago de altura de la mordida, se podrá tener una mordida fuera de contacto de 0,5 mm.



9 10 Superficies oclusales con alto brillo, super lisas, gnatológicas, con un contacto perfecto, es la condición para obtener colados ajustados. No solo se ahorra tiempo en la creación de la cara oclusal en cera, sino también a la hora de repasar en coronas y puentes utilizando Gnathoflex Premium.



### Caras oclusales en resina



1 Sobre la estructura preparada se colocará resina K+B (dentina).



2 Se rellena al principio solo las cúspides del Gnathoflex con incisal y luego se termina de llenar con dentina. No hace falta pincelar separador a la preforma.



3 Colocar Gnathoflex sobre el puente, cerrar el articulador y polimerizar con luz UV la resina para fijar la mordida.



4 A continuación se retira el puente del modelo, se crean los puntos de contacto laterales y se termina de polimerizar la resina.

### Superficies oclusales de cerámica



1 Se pincela opaquer sobre la estructura y se cuece.



2 Sujetar la preforma de Gnathoflex con una pinza y pincelar su interior con el separador Isoflex.



3 Retirar los excesos de Isoflex por medio de golpear varias veces con el dedo sobre la preforma de Gnathoflex.



4 5 6 Introducir incisal en las cúspides de la preforma y estirarla por las paredes laterales. Rellenar a continuación el Gnathoflex con dentina y posicionarla sobre la estructura del puente. Cerrar el articulador y darle la vuelta. Fijar las preformas oclusales con dentina a la estructura. Absorber el líquido sobrante y retirar con cuidado el Gnathoflex. Se realizará lo mismo con el resto de las preformas oclusales. Terminar de modelar el puente.

antes de rellenar realizar una fotocopia

# Gnathoflex Premium

















































17	16	15	14	24	25	26	27	
 429 P017 C <input type="checkbox"/>	 429 P016 C <input type="checkbox"/>	 429 P015 C <input type="checkbox"/>	 429 P014 C <input type="checkbox"/>	 429 P024 C <input type="checkbox"/>	 429 P025 C <input type="checkbox"/>	 429 P026 C <input type="checkbox"/>	 429 P027 C <input type="checkbox"/>	<b>C</b>
 429 P017 B <input type="checkbox"/>	 429 P016 B <input type="checkbox"/>	 429 P015 B <input type="checkbox"/>	 429 P014 B <input type="checkbox"/>	 429 P024 B <input type="checkbox"/>	 429 P025 B <input type="checkbox"/>	 429 P026 B <input type="checkbox"/>	 429 P027 B <input type="checkbox"/>	<b>B</b>
 429 P017 A <input type="checkbox"/>	 429 P016 A <input type="checkbox"/>	 429 P015 A <input type="checkbox"/>	 429 P014 A <input type="checkbox"/>	 429 P024 A <input type="checkbox"/>	 429 P025 A <input type="checkbox"/>	 429 P026 A <input type="checkbox"/>	 429 P027 A <input type="checkbox"/>	<b>A</b>
 429 P047 A <input type="checkbox"/>	 429 P046 A <input type="checkbox"/>	 429 P045 A <input type="checkbox"/>	 429 P044 A <input type="checkbox"/>	 429 P034 A <input type="checkbox"/>	 429 P035 A <input type="checkbox"/>	 429 P036 A <input type="checkbox"/>	 429 P037 A <input type="checkbox"/>	<b>A</b>
 429 P047 B <input type="checkbox"/>	 429 P046 B <input type="checkbox"/>	 429 P045 B <input type="checkbox"/>	 429 P044 B <input type="checkbox"/>	 429 P034 B <input type="checkbox"/>	 429 P035 B <input type="checkbox"/>	 429 P036 B <input type="checkbox"/>	 429 P037 B <input type="checkbox"/>	<b>B</b>
 429 P047 C <input type="checkbox"/>	 429 P046 C <input type="checkbox"/>	 429 P045 C <input type="checkbox"/>	 429 P044 C <input type="checkbox"/>	 429 P034 C <input type="checkbox"/>	 429 P035 C <input type="checkbox"/>	 429 P036 C <input type="checkbox"/>	 429 P037 C <input type="checkbox"/>	<b>C</b>
<b>47</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	

Imagen a tamaño original.

Elijan del prospecto con la reproducción de tamaño original la preforma deseada.

Marquen la cantidad deseada en el recuadro de la preforma o con una cruz el surtido deseado.

Remitente (Sello):	Nº de cliente
Fecha, Firma	

**Surtido de Gnathoflex Premium:**

16 piezas, consta de 16 formas en tamaño A  
REF 429 P000 A

16 piezas, consta de 16 formas en tamaño B  
REF 429 P000 B

16 piezas, consta de 16 formas en tamaño C  
REF 429 P000 C

48 piezas, consta de 16 formas en tamaño ABC  
REF 429 P004 8

Marque aquí la cantidad deseada de surtidos.