

visio.lign[®]

Sistema de revestimiento

Nosotros suministramos el sistema. Usted cosecha el éxito.

FABRICACIÓN ECOLÓGICO



FSC®

El papel utilizado para esta descripción general del sistema visio.lign se prepara de acuerdo con el estándar internacional FSC . La pulpa de papel se ha realizado según forma proporcional certificado, gestionado de manera responsable las tierras forestales. Esto también es corroborado de que preserva la biodiversidad y los procesos ecológicos del bosque en la eliminación de los productos de madera .

Estética natural para soluciones
protésicas implantosoportadas
perfectas mediante materiales
poliméricos y composites armo-
nizados.

visio.lign[®]
Sistema de revestimiento

visio.lign® Indicaciones

- Restauración inmediata provisional
- Prótesis implantosoportada
- Trabajos con puentes, barras y pasadores
- Técnica de carillas
- Inlays - Onlays - Overlays
- Prótesis fija y removible

visio.lign® Ventajas

- + Estabilidad del color
- + Resistencia a la placa
- + Estética reproducible
gracias a carillas prefabricadas
- + Valores de abrasión comparables a los de los dientes naturales
- + Unión resistente con todos los materiales de estructuras
(verificado por universidades)
- + Compatibilidad gnatólogica
- + Estandarización del procesamiento
- + Posibilidad de estratificación a mano libre personalizada
- + Óptimo para acabados y Cut-Back
de restauraciones fabricadas por CAD-CAM
- + Reparación a causa de Chipping a nivel cerámico
- = Ideal para restauraciones estéticas con prótesis implantosoportadas, así como fijas y removible.

visio.lign®

Componentes del sistema

Montaje		Páginas
Cera para montajes y silicona para llaves	beauty setup visio.sil	8 8 - 9
Carillas para revestimiento y dientes completos	novo.lign neo.lign	12 y 14 13 y 15
Unión		
Composite de fijación y Primers	combo.lign MKZ Primer MKZ EM-Activador K-Primer visio.link	19 18 18 18 18
Opaquer	combo.lign Opaquer (y catalizador) crea.lign Opaker crea.lign Opaker Z, liner para circonio	19 19 19
Estratificación		
Maquillaje	visio.paint	22
Líquido para modelado	crea.lign Modelling Liquid	22
Composite / materiales de revestimiento	crea.lign Gel crea.lign Pasta crea.lign Stains crea.lign Paletas de colores	23 23 23 23
Opciones		
Sets del sistema	Maletines y cajas visio.lign® Sets novo.lign Sets neo.lign Sets crea.lign Sets Opáquer, pinturas y Set de repasado	26 - 27 28 - 30 31 32 33 - 36 37
Equipos, instrumental y accesorios	bre.Lux Power Unit visio.lign® Toolkit Instrumental/material fungible visio.lign® Armario para dientes	40 41 42 - 44 45
Tablas de combinaciones y correspondencias de colores	Matriz para transformación del material Equipos de polimerización de otros fabricantes compatibles con el sistema bre.Lux Tiempos de polimerización Correspondencia de colores: crea.lign Opaker, combo.lign Opaquer crea.lign Dentin a Enamel	48 49 49 50 50 50





Imagen: Dr. Vincenzo Musella, Modena (Italia)

Ceras para montajes y siliconas para llaves



beauty setup Cera

Cera de fijación color dentina para la prueba estética

La cera beauty setup es de color dentina y se ha desarrollado para fijar carillas novo.lign para la prueba estética. Con sus dos tonalidades se



claro



oscuro

obtiene mediante mezclado la escala clásica de colores A-D.



visio.sil fix

Silicona para detalles finos para llaves
 Dureza aprox. 55 ShoreA

visio.sil fix es una silicona de adición reticulado para llaves que permite obtener detalles finos. Con visio.sil fix puede realizarse la toma de impresión de los espacios interdentes y el modelado de la encía para el



amarillo

montaje de cera con suma perfección representando hasta el último detalle. Tras fabricar la restauración ya sólo se requerirá realizar el pulido hasta obtener un brillo intenso. De este modo se ahorra trabajo y tiempo.



visio.sil

Silicona transparente para llaves
Dureza aprox. 60 ShoreA

visio.sil es una silicona transparente de adición reticulado para la fabricación de llaves translúcidas usadas en el procesamiento de materiales fotopolimerizantes.

 transparente

i

Ventaja: de las siliconas transparentes para llaves visio.sil y visio.sil ILT

Las siliconas para llaves visio.sil y visio.sil ILT son translúcidas. Esto permite polimerizar las carillas que se va a adherir sin tener que quitar la llave.



visio.sil ILT

Silicona transparente para llaves al usar la técnica de estratificado "inverso"
Dureza aprox. 75 ShoreA

visio.sil ILT se desarrolló especialmente para la técnica de estratificado inverso. Esta silicona transparente de adición reticulado para llaves, destaca por su gran dureza de unos 75 Shore A. Tiene buena fluidez para reproducir del espacio interdental y copiar perfecta-

 transparente

mente la textura de la superficie, pero al mismo tiempo es estable y puede aplicarse con precisión. visio.sil ILT puede insertarse después de haber endurecido en la boca del paciente (producto sanitario de la clase I).


i

Ventaja de la silicona transparente para llaves visio.sil ILT

visio.sil ILT es una silicona para llaves homologada para su uso en boca y es idónea para el posicionamiento y la adhesión de carillas indirectas.

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.



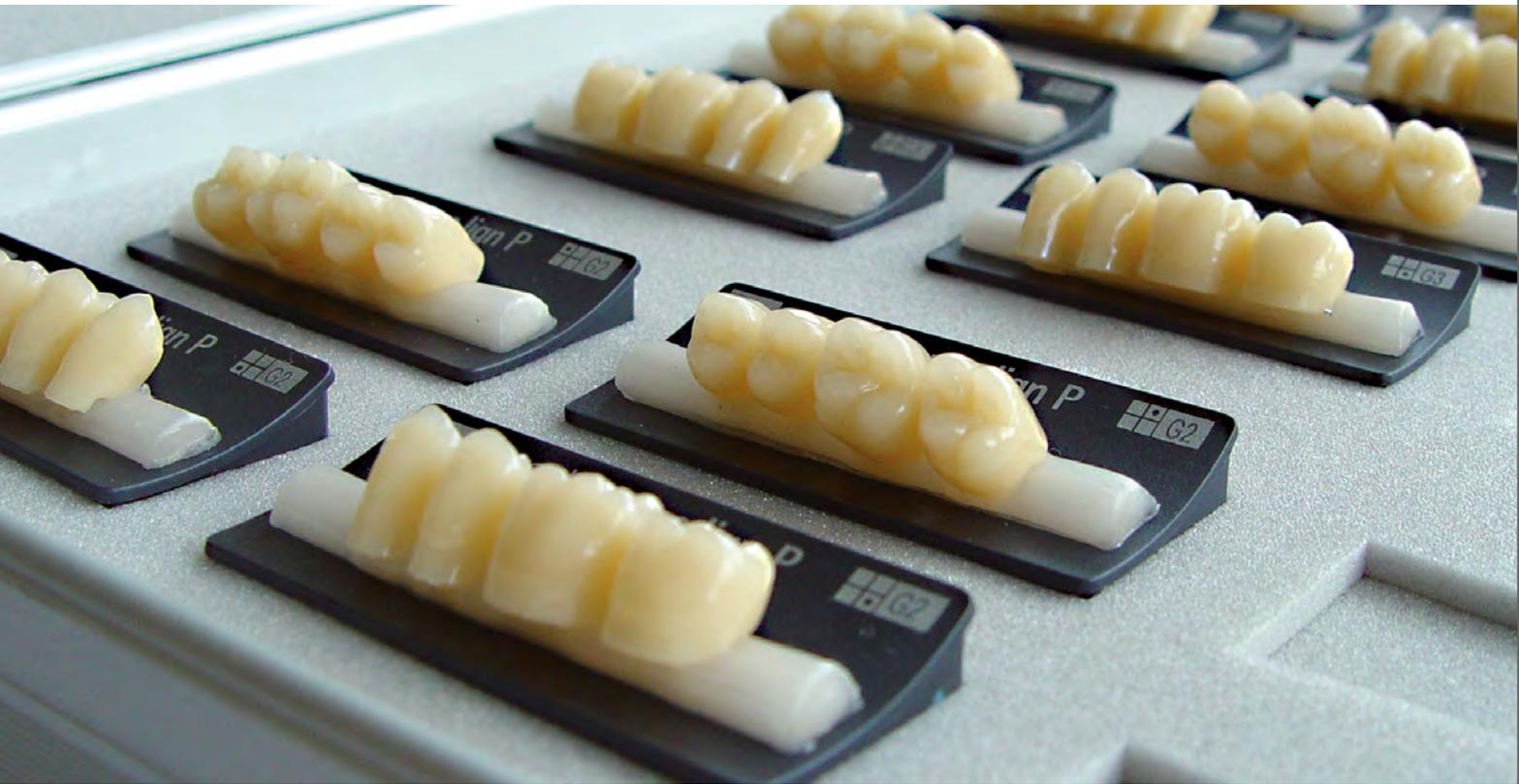

Carillas y dientes completos

novo.lign

Carillas de revestimiento

Colores, formas y diseño están armonizados a la perfección con los dientes completos neo.lign, lo que permite la combinación con los mismos colores y formas.



- Estética natural, emulando a la naturaleza
- Dientes anteriores y posteriores formados por finas capas de composite de PMMA de alto impacto (polimetil metacrilato) de gran resistencia.
- Disponible en todos los colores clásicos de A a D, incluyendo los colores A1 – D4 y el color bleach BL3
- Los dientes posteriores novo.lign permiten trasladar todos los conceptos de oclusión gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias de las formas G, W y L.
- Las formas W, con ancho "extraordinario", son más adecuadas que las "delgadas" formas G para revestir estructuras de coronas y puentes más voluminosas W.
- Las formas L con diseño "lingualizado" de las superficies masticatorias son idóneas para la construcción de soluciones protésicas totales implantosoportadas.

novo.lign A

Anterior / dientes anteriores



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- 12 Formas de maxilar superior
- 3 Formas de maxilar inferior

Formas anteriores también disponibles en Surtidos de 4 o 2

(representación a escala menor de la real)



novo.lign P

Posterior / dientes posteriores

Formas G



Grosor del tabique bucal 1,2 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Disponible en los siguientes tamaños



pequeño grande

Formas L



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias, para prótesis totales

Disponible en los siguientes tamaños



pequeño grande

Formas W



Grosor del tabique bucal 0,8 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión
- Forma anatómica "extra" ancha, especialmente recomendada para revestir coronas y puentes.

Disponible en los siguientes tamaños



pequeño grande

BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B

neo.lign

Dientes completos

Colores, formas y diseño están armonizados a la perfección con las carillas de revestimiento novo.lign, y por ello perfectamente combinables.



- Estética natural, emulando a la naturaleza
- Dientes anteriores y posteriores formados por finas capas de composite de PMMA (polimetil metacrilato) de gran resistencia.
- Disponible en todos los colores clásicos de A a D, incluyendo A1 – D4, así como el color blanqueador BL3
- Los dientes posteriores neo.lign permiten trasladar cualquier concepto de oclusión gracias al diseño multifuncional de sus superficies masticatorias en las formas G- y L.
- Las formas L de neo.lign del sistema visio.lign con su diseño "lingualizado" de las superficies masticatorias están pensadas especialmente para fabricar restauraciones con prótesis totales.

neo.lign A

Anterior / dientes anteriores



- 11 formas de maxilar superior
- 4 formas de maxilar inferior

neo.lign P

Posterior / dientes posteriores

Formas G



- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Formas L




- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias para prótesis totales

Disponible en los siguientes tamaños



pequeño  grande

Disponible en los siguientes tamaños

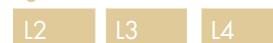

pequeño  grande

3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.

novo.lign

Carillas de revestimiento

Codificación

Todas las tablillas de dientes de las carillas novo.lign llevan impresas las inscripciones en color plata.

novo.lign es el nombre que identifica a todas las carillas dentro del sistema de revestimiento visio.lign.

novo.lign A



Listado de todas las formas de novo.lign para maxilar superior e inferior más la tabla de correspondencias

Se puede descargar de forma gratuita en la web www.visio.lign.com o pedir por teléfono llamando al 0034 961310561 **REF 0002020E**


La **A** indica que es anterior, e incluye todas las formas de dientes anteriores para maxilar superior e inferior.

Forma del diente, p. ej. D49

Color del diente, p. ej. A3

novo.lign P

Formas G

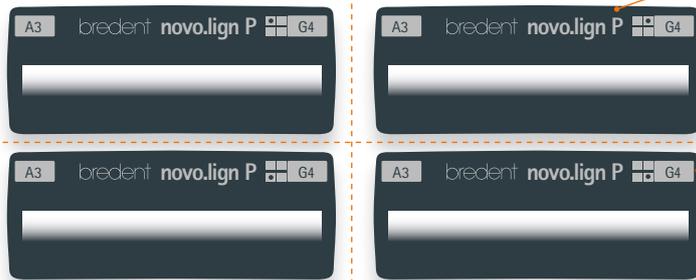


P indica que es posterior, e incluye todas las formas de dientes posteriores para maxilar superior e inferior.

En las variantes de las carillas de revestimiento de novo.lign P se diferencia entre las formas **G, W y L**.

Tanto las formas G como las formas W y las formas L están disponibles en **diferentes tamaños**. El tamaño se ha identificado mediante números. A mayor tamaño, mayor número. Las formas G de las carillas están disponibles en los tamaños 3 y 4; las formas W están disponibles en los tamaños 1, 2 y 3; y las formas L están disponibles en los tamaños 2 y 3.

Formas W

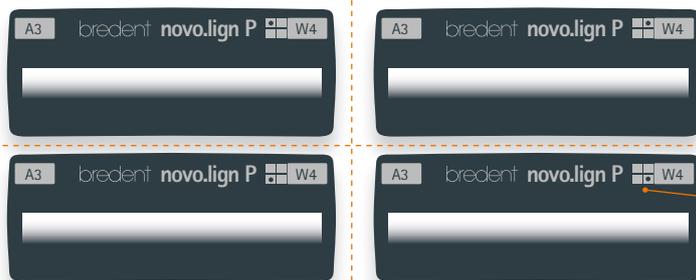

➔ Véase las tablas de tamaños en la pág. 12.

Las formas G y W están **agrupadas por cuadrantes**, es decir que en una tablilla de dientes se encuentran, por ejemplo, premolares y molares del maxilar inferior del 3º cuadrante de una forma y tamaño, p. ej. W4.

Sobre las tablillas de dientes de las formas G, W y L se ha representado los cuatro cuadrantes con cuatro cuadrillos. El cuadrante correspondiente está marcado con un punto.

Formas L



Las formas L de las carillas novo.lign P están disponibles en dos tamaños, L2 y L3. Las tablillas de dientes llevan o bien 6 dientes posteriores del maxilar superior (16,15,14 ,24, 25y 26) o bien 6 dientes posteriores del maxilar inferior (46, 45, 44, 34, 35 y, 36).

neo.lign

Dientes completos

Codificación

Todas las tablillas de dientes completos neo.lign llevan impresas las inscripciones en color dorado.

neo.lign es el nombre de los dientes completos que forman parte del sistema de revestimiento des visio.lign.



Listado de todas las formas para maxilar superior e inferior de neo.lign más la tabla de correspondencias

Se puede descargar de forma gratuita en la web www.visio-lign.com o pedir por teléfono llamando al 0034 961310561 REF 0003290E

neo.lign A




La A indica que es anterior, e incluye todas las formas de dientes anteriores para maxilar superior e inferior.

Forma del diente, p. ej. D48

Color del diente, p. ej. B4

neo.lign P

Formas G

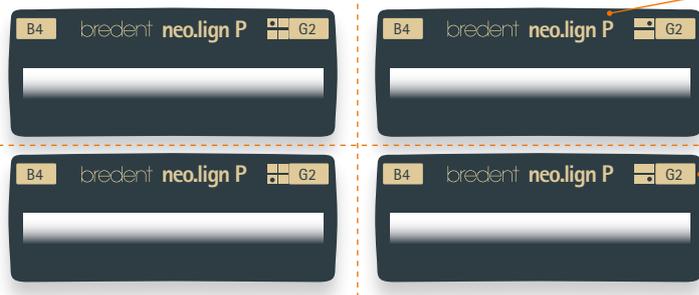

P indica que es posterior, e incluye todas las formas de dientes posteriores para maxilar superior e inferior.

En las variantes de los dientes posteriores neo.lign P se diferencia entre las formas G y las formas L.


Tanto las formas G como las formas L están disponibles en diferentes tamaños. El tamaño se ha identificado mediante números. A mayor tamaño, mayor número. Tanto las formas G como las formas L de los dientes completos están disponibles en los tamaños 2, 3 y 4.

→ Véase las tablas de tamaños en la página 13.

Las formas G están agrupadas por cuadrantes, es decir que en una tablilla de dientes se encuentran, por ejemplo, premolares y molares del maxilar superior del 1º cuadrante.

En el caso de las formas L, las tablillas de dientes tienen todos los dientes del maxilar superior (17, 16, 15, 14, 24, 25, 26 y 27) o todos los dientes del maxilar inferior (47, 46, 45, 44, 34, 35, 36 y 37) en cada uno de los tamaños correspondientes. Sobre las tablillas de dientes de las formas G y L se ha representado los cuatro cuadrantes con cuatro cuadrillos. El cuadrante correspondiente está marcado con un punto.

Formas L

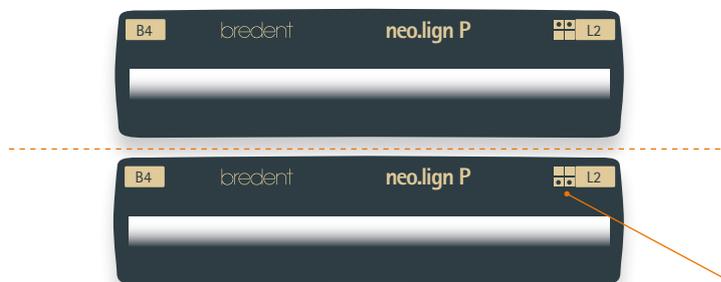

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.





Imagen: Dr. Vincenzo Musella, Modena (Italia)

Primer, opáquer y composite para fijación

MKZ Primer



Unión por adhesión de composite con estructuras de metal

- aleación de titanio
- aleación de CoCr (libre de metales nobles, metales no nobles)
- dióxido de circonio (aluminio/cerámica Spinell)

El Primer MKZ sirve para acondicionar todas las aleaciones metálicas de metales no nobles, titanio, dióxido de circonio, óxido de aluminio y cerámica Spinell. Esto permite una unión mediante adhesión química con composites como el crea.lign. La imprimación MKZ resulta por ello óptima para adherir aditamentos personalizados. El Primer MKZ puede aplicarse intraoralmente.

MKZ EM Activador



Unión por adhesión de composite con estructuras de metales nobles

- aleaciones de metales nobles (Au, Ag, Pt, Pd)
- aleaciones eco (aleaciones con menos metales nobles)

⚠ Usar sólo en combinación con la imprimación MKZ, véase el cuadro informativo.

El activador MKZ EM sólo debe usarse en combinación con el Primer MKZ, mezclándose en una proporción de 1:1 para acondicionar (Au, Ag, Pt, Pd) y conseguir de este modo la unión por adhesión química con composites como crea.lign. El activador MKZ EM puede aplicarse intraoralmente.



Ventajas obtenidas de mezclar MKZ Primer con MKZ EM-Activador



Mezclar uno mismo los componentes antes de la aplicación tiene la ventaja de que uno mismo puede preparar las mezclas con la misma composición durante

un largo tiempo una vez abiertas las botellitas y conseguir así el acondicionamiento necesario.

K-Primer



Unión por adhesión de composite con estructuras de cerámica de óxido

- cerámica de silicato (blanks para CAD, e-max, Mark II, disilicato de litio, cerámica vítrea)

El K-Primer procura una unión mediante adhesión entre cerámica de revestimiento, cerámica inyectada, e.max press así como cerámica de silicato, p. ej. blanks para CAD, o Mark II y composites como el crea.lign. Ideal para la reparación de revestimientos de cerámica ya que está permitido el uso intraoral de K-Primer.

visio.link



Unión por adhesión de composite con resinas

- composite (composite de revestimiento/dientes de composite)
- materiales de PMMA
- polímero de alto rendimiento (BioXS/BioHPP®)

Imprimación universal fotopolimerizante, cuya aplicación intraoral está permitida, para PMMA y composite; para la unión por adhesión óptima entre resinas de prótesis con base de PMMA, PMMA de gran resistencia y materiales de composite (carillas de revestimiento novo.lign/dientes completos neo.lign/dientes de resina) y combo.lign.



i


combo.lign Opaquer Catalizador

No requiere fotopolimerización para el curado. Para la autopolimerización mezclar combo.lign Opaquer Catalizador con la pasta de color combo.lign Opaquer en la proporción 1 : 1.

combo.lign Opaquer (y catalizador)

Opáquer foto y autopolimerizante, que garantiza un curado perfecto. Con colores armonizados para la aplicación de composite de fijación combo.lign y carillas de revestimiento novo.lign. Sistema de unión verificado en universidades y compatible con

todas las imprimaciones para metales y los procesos de silanización, óptimo al usar retenciones mecánicas. Disponible en tres colores de diente y uno de encía. En combinación con combo.lign garantiza solidez de todos los colores de la gama A-D.

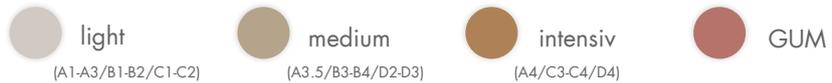

➔ Tablas de combinación de colores, véase la página 50



combo.lign Composite de fijación

Composite de fijación fotopolimerizante y en dos fases para una reproducción fiable del color y la unión óptima entre la carilla novo.lign y todos los materiales de estructuras.

Disponible en los colores clásicos A-D y el color bleach BL3.

➔ Colores clásicos A a D y color bleach BL3, véase las páginas 12 y 13.



crea.lign Opaker

El crea.lign Opaker es fotopolimerizable y garantiza el color en la estratificación libre y al usar las carillas de revestimiento novo.lign.

Junto con el Primer MKZ forma la base para la unión óptima con los materiales metálicos y cerámicos de las estructuras

y de ese modo construir restauraciones con prótesis de larga vida útil sin fisuras en los bordes. Con tan solo 8 opáquer se cubre todo el sistema de colores clásicos A-D. También contiene un liner especial para circonio y el opáquer GUM.




➔ Tablas de combinación de colores, véase la página 50



crea.lign Opaker Z, liner para circonio

El liner fotopolimerizante para circonio es un opáquer transparente. Al trabajar con circonio es imprescindible aplicar, tras la correspondiente imprimación

(MKZ Primer), el liner para circonio, para conseguir una unión mediante adhesión garantizada entre el óxido de circonio y el composite.

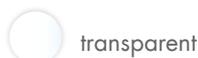

⚠ Las estructuras de circonio teñidas dejan traslucir el color, por lo que no se aplica un opáquer habitual, siempre que el color de la estructura se corresponda con los colores clásicos A - D .

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.





Imagen: Dr. Vincenzo Musella, Modena (Italia)

Composite/materiales de revestimiento, maquillaje y líquido para modelado

crea.lign Composite/Material para revestir

Ventajas

- Relleno puro de nanocerámica (no contiene vidrio dental)
- Propiedades ideales para el pulido y así obtener superficies perfectas
- R_a 0,03 μ m (= valor medio de rugosidad para la calidad/rugosidad de la superficie)
- Fluidez, cubrición óptima – transición sin fisuras a la carilla para revestimiento
- Baja absorción de agua, garantiza la resistencia mecánica
- Sin adhesión de placa, predestinado para prótesis implantosoportadas
- Composite fotopolimerizante disponible en gel o pasta
- Gel en los colores clásicos A-D: Dentin, Incisal, GUM, Modifier, Transpa, Stains y el color bleach BL3
- Pasta en los colores clásicos Dentin A-D y el color bleach BL3
- Opáquer fotopolimerizante crea.lign en ocho colores para dientes y un color para encía para la estratificación libre.

- ➔ *crea.lign Opaker, véase la página 19.*
- ➔ *crea.lign Accesorios, a partir de la página 39.*
- ➔ *Colores clásicos A a D y color bleach BL3, véase también las páginas 12 y 13.*
- ➔ *Tablas de combinación de colores, véase la página 50.*

visio.paint Surtido de maquillajess

Las pinturas líquidas y fotopolimerizantes visio.paint (white/blue/black/ivory/ocher/ebony) se aplican mediante la técnica de recorte Cut-Back o directamente, y se cubren con capas. La pintura superficial sólo se recomienda en restauraciones provisionales. Mediante la superposición de capas de composite se mantiene el efecto del color. Con las pinturas visio.paint puede intensificarse todas las resinas PMMA y composites habituales.



crea.lign Modelling Liquid

Con el líquido para modelado crea.lign puede aumentarse la fluidez de la pasta y del gel crea.lign. Añadiendo el líquido a la mezcla también se reduce el módulo de elasticidad de las masillas, incrementando así la elasticidad de las masillas crea.lign. Además

permite en la personalización del rojo y blanco una transición homogénea de la resina de la prótesis al composite crea.lign. Las masillas crea.lign son resistentes frente a la pérdida de color y frente a la placa dental.



⚠ *En la mezcla con crea.lign, la proporción del líquido de modelado Modelling Liquid no debe superar el 30 %.*


crea.lign Gel

Gel Enamel e Incisal



Los crea.lign Incisal (opal/blue/rose/universal) sirven junto con las masas Enamel (E1/E2/E3/E4) para acentuar la región incisal, p. ej. para dar un toque más joven a un incisal.

Gel GUM

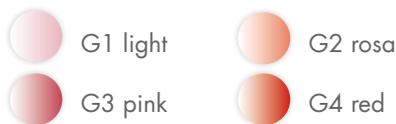

crea.lign GUM (light/rosa/pink/red) sirven para personalizar la zona de encía, el sustituto dental consigue así un efecto de mayor viveza.

Gel Transpa



crea.lign Transpa clear es la variante transparente del composite crea.lign y tiene excelentes propiedades físicas y consigue también una unión óptima con el material BioHPP. Gracias a su transparencia, crea.lign Transpa permite, al sumarse a las pinturas visio paint, una caracterización translúcida de gran estética, siendo el material de revestimiento de composite perfecto para satisfacer las máximas exigencias.

Gel Dentin / Modifier



crea.lign Dentin está disponible en los colores clásicos A-D y el color bleach BL3.



crea.lign Modifier (beige/oliv/caramel/lila/umbra) son geles de colores más intensos, p. ej. para destacar la zona del cuello o imitar manchas de cal.

crea.lign Pasta

Pasta Dentin



crea.lign pasta Dentin es la variante en pasta del composite crea.lign. La pasta crea.lign tiene también exclusivamente relleno de nanocerámica (no contiene vidrio dental), ofrece excelentes propiedades para el pulido y puede trabajarse sin problemas en combinación con todas las demás masillas crea.lign.

crea.lign pasta está disponible en los colores clásicos Dentin A-D y el color bleach BL3.

crea.lign Stains



crea.lign Stains (brown/orange) son masillas fotopolimerizantes intensas y se aplican para personalizar mediante colores los revestimientos de composite. No se requiere cubrir con capas los crea.lign Stains, se usan para enfatizar, p. ej. espacios interdientales, bordes incisales y fisuras.

crea.lign Paletas de colores / Muestrario de tonos



⚠ El alcance del suministro no incluye muestras de colores.

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.





Sets de sistema

Maletín de resina Chipping Repair Kit

con el material requerido para el laboratorio dental

cara posterior



cara anterior

- ➔ Lista de artículos / contenido del Surtido para la reparación de descascarillado, véase la página 36.
- ➔ El maletín de resina también está disponible sin piezas. REF CLIGNSETT

Caja de aluminio Chipping Repair Kit

con el material requerido para la clínica odontológica



- ➔ Lista de artículos / contenido del Surtido para la reparación de descascarillado, véase la página 36.

Caja de aluminio con el muestrario de formas vivas

para las carillas de revestimiento novo.lign y/o los dientes completos neo.lign



- ➔ Lista de artículos / Para consultar el contenido del muestrario de diseños vivos novo.lign, véase a página 31.



- ➔ Lista de artículos / Para consultar el contenido del muestrario de formas vivas neo.lign, véase la página 32.

Caja de aluminio Estética del rojo y blanco



→ Lista de artículos / Sobre el contenido de los Surtidos para la estética del rojo y blanco, véase la página 33.

Maletín de aluminio con el Surtido completo de crea.lign freestyle




→ Lista de artículos de los Surtidos completos crea.lign, véase la página 35.


Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.

visio.lign® Surtidos


REF VLIGNSET2
visio.lign® Kit de introducción 2

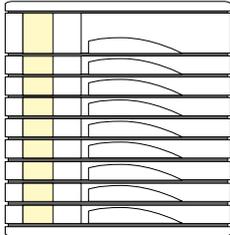 visio.lign® Armario
 para dientes/caja


1 x

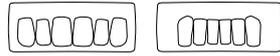 novo.lign A Carillas de revestimiento -
 dientes anteriores


10 Tablillas de dientes

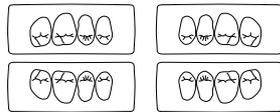 novo.lign P - Carillas de revestimiento -
 dientes posteriores


8 Tablillas de dientes

visio.link, 10 ml

1 x


 combo.lign, Cánula para mezclas
 t. 2

1 x 10



combo.lign Composite de fijación,

8 g

1 x



Listado de todas las formas
 para maxilar superior e inferior
 de novo.lign más la tabla de
 correspondencias

Se puede descargar de forma gratuita en la web
www.visio-lign.com o pedir por teléfono llamando
 al 0034 961310561 **REF 0002020E**

Surtido de un color elegido por el usuario
 → Colores clásicos de A a D y color bleach BL3, véase las páginas 12 y 13.


novo.lign A y P tablillas de dientes
 Carillas de dientes anteriores y posteriores,
 con las formas elegidas por el usuario.

→ véase la caja de .


novo.lign P tablillas de dientes
 Carillas de dientes posteriores, con las formas
 elegidas por el usuario.

 → Tablas con los tamaños,
 véase la página 12.


REF VLIGNSET3
visio.lign® Kit de introducción 3

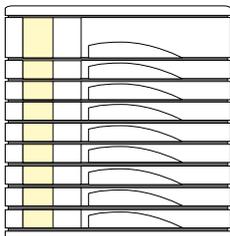 visio.lign® Armario
 para dientes/caja


1 x

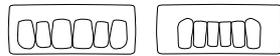 novo.lign A Carillas de revestimiento -
 dientes anteriores


13 Tablillas de dientes

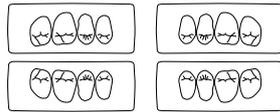 carillas de revestimiento novo.lign P -
 dientes posteriores


8 Tablillas de dientes

 Mango de sujeción
 crea.lign Gel

2 x



visio.link, 10 ml

1 x



crea.lign Opaker, 4 g

1 x



Pin Cover

1 x 10

Cánula para aplicación

1 x 10

2 x

crea.lign Gel, 5g

Cánula para mezclas

combo.lign, t. 2

1 x 10



combo.lign Composite de fijación,

8 g

1 x



Surtido en un color elegido por el usuario
 → Colores clásicos de A a D y color bleach BL3, véase las páginas 12 y 13.

novo.lign A y P Tablillas de dientes
 Carillas de revestimiento para dientes
 anteriores y posteriores, con las formas
 elegidas por el usuario.

→ véase la caja .

novo.lign P Tablillas de dientes
 Carillas de revestimiento para dientes
 posteriores, con las formas elegidas por
 el usuario.

 → Tablas con los tamaños,
 véase la página 12.


crea.lign Gel Incisal y
 colores Dentin elegidos por el usuario.

 → Consultar los colores en
 la página 23.

visio.lign® Surtidos

REF VLIGNSET4 visio.lign® Kit de introducción 4

visio.lign® Armario para dientes/caja

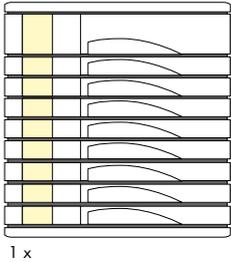


1 x

novo.lign A Carillas de revestimiento - dientes anteriores




26 Tablillas de dientes

carillas de revestimiento novo.lign P - dientes posteriores

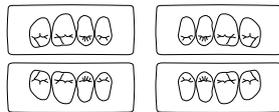

24 Tablillas de dientes

Mango de sujeción crea.lign Gel

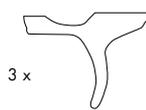

3 x

visio.link, 10 ml



1 x

Surtido en dos colores elegidos por el usuario.

➔ Colores clásicos de A a D y color bleach BL3, véase las páginas 12 y 13.

novo.lign A y P Tablillas de dientes Carillas de revestimiento para dientes anteriores y posteriores, con las formas elegidas por el usuario.

➔ véase la caja

novo.lign P Tablillas de dientes Carillas de revestimiento para dientes posteriores, con las formas elegidas por el usuario.

➔ Tablas con los tamaños, véase la página 12.

crea.lign Gel Incisal y colores Dentin elegidos por el usuario.

➔ Consultar los colores en la página 23.

crea.lign Opaker, 4 g



2 x

Pin Cover



1 x 10

Cánula para aplicación



1 x 10

crea.lign Gel, 5g



10 x

combo.lign, Cánula para mezclas t. 2




1 x 10

combo.lign Composite de fijación, 8 g




2 x

Cánula para mezclas verde, t. 4

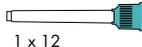

1 x 12

visio.sil Silicona para llaves, 50 ml

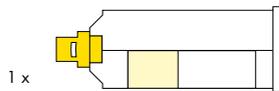

1 x

MKZ Primer, 4 ml



1 x


Modelling Liquid, 10 ml



1 x

REF VLUPSETN visio.lign® Upgrade Set N

crea.lign Opaker, 4 g

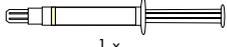


1 x

novo.lign A Carillas de revestimiento - dientes anteriores



13 Tablillas de dientes

carillas de revestimiento novo.lign P - dientes posteriores

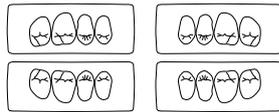

12 Tablillas de dientes

crea.lign Gel, 5g



1 x

Surtido de dientes en el color elegido

➔ Colores clásicos de A a D y color bleach BL3, véase las páginas 12 y 13.

novo.lign A y P Tablillas de dientes Carillas de revestimiento para dientes anteriores y posteriores, con las formas elegidas por el usuario.

➔ véase la caja

novo.lign P Tablillas de dientes Carillas de revestimiento para dientes posteriores, con las formas elegidas por el usuario.

➔ Tablas con los tamaños, véase la página 12.

Cánula para mezclas combo.lign, t. 2



1 x 10

combo.lign Composite de fijación, 8 g



1 x

crea.lign Gel elegido por el usuario.

➔ Véase la lista en la página 23.


visio.lign® Surtidos

REF VLIGNPRVC
visio.lign® Set PRVC


visio.lign® Caja de aluminio




1 x

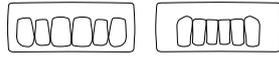 novo.lign A Carillas de revestimiento -
 dientes anteriores

 Tablilla de diente,
 maxilar superior

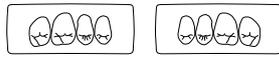 Tablilla de diente,
 maxilar inferior

 novo.lign P Carillas de revestimiento-
 dientes posteriores

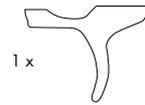 2 Tablillas de
 dientes, maxilar
 superior

 2 Tablillas de
 dientes, maxilar
 inferior

 Mango de sujeción
 crea.lign Gel


1 x

visio.link, 10 ml



1 x

Surtido de dientes en el color elegido

➔ Colores clásicos de A a D y color bleach BL3, véase las páginas 12 y 13.

 novo.lign A y P Tablillas de dientes
 Carillas de revestimiento para dientes
 anteriores y posteriores, con las formas
 elegidas por el usuario.

➔ véase la caja

 novo.lign P Tablillas de dientes
 Formas de las carillas de revestimiento
 para dientes posteriores, con las formas
 elegidas por el usuario.

 ➔ Tablas con los tamaños,
 véase la página 12.

Cánula para aplicación

8 x

crea.lign Gel, 5g

8 x

 Cánula para mezclas
 combo.lign, t. 2

1 x 10

 combo.lign Composite de fijación,
 8 g

1 x

crea.lign Stain, 1,4 g

2 x

 crea.lign Gel y Stains elegidos por el
 usuario.

➔ Véase la lista en la página 23.

MKZ Primer, 4 ml

1 x

Modelling Liquid, 10 ml

1 x


combo.lign Opaquer, 4 g

1 x


 combo.lign Opaquer
 Colores elegidos por el usuario.

➔ Consultar colores en la página 19.

crea.lign Paleta de colores/Guía de tonalidades (completa)

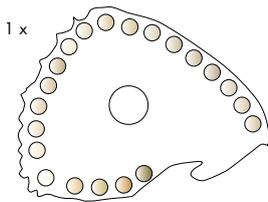

1 x

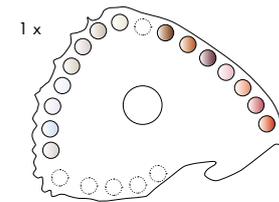

1 x

combo.lign Katalyst, 4 g

1 x

novo.lign Surtidos

REF VLIGNPRVN


novo.lign A y P Muestrario de formas vivas

visio.lign® Caja de aluminio



1 x

novo.lign A - Carillas de revestimiento -
dientes anteriores

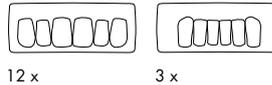


12 x

3 x

= 15 Tablillas de dientes:
1 Tablilla de dientes de cada forma
→ véase la caja ⓘ

novo.lign P - Carillas de revestimiento -
dientes posteriores

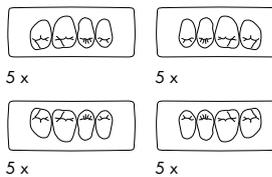

5 x

5 x

5 x

5 x

= 20 Tablillas de dientes:
con las formas G y W
en los tamaños:
G3, G4 y W3, W4, W5.

1 x

1 x

= 4 Tablillas de dientes:
con la forma L, 1 x los tamaños:
L2 y L3

Surtido de dientes en el color elegido.

→ Colores clásicos de A a D y color bleach BL3, véase las páginas 12 y 13.

novo.lign A y P Tablillas de dientes, Formas de las carillas de revestimiento para dientes anteriores y posteriores → véase la caja ⓘ.


novo.lign P Tablillas de dientes Formas de las carillas de revestimiento para dientes posteriores elegidas por el usuario.

→ Tablas con los tamaños, véase la página 12.

REF VLIGNSETP

novo.lign P Upgrade Set

novo.lign P Carillas de revestimiento -
dientes posteriores

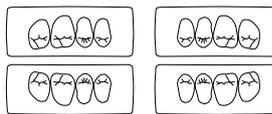

16 Tablillas de dientes

Surtido en dos colores elegidos por el usuario

→ Colores clásicos de A a D y color bleach BL3, véase las páginas 12 y 13.

novo.lign A y P Tablillas de dientes elegidos por el usuario (carillas de revestimiento para dientes posteriores elegibles de entre las formas G y/o W).

→ Tablas con los tamaños de novo.lign P, véase la página 12 y para todas las formas de novo.lign A y P, véase la caja ⓘ



Listado de todas las formas para maxilar superior e inferior de novo.lign más la tabla de correspondencias

Se puede descargar de forma gratuita en la web www.visio-lign.com o pedir por teléfono llamando al 0034 961310561 REF 0002020E

neo.lign Surtidos


REF VLIGNPRVT

neo.lign A & P Surtido de formas vivas

visio.lign® Caja de aluminio



neo.lign A Dientes completos - dientes anteriores

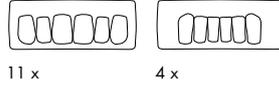


11 x

4 x

 = 15 Tablillas de dientes:
 1 Tablilla de dientes de cada forma
 → véase la caja

neo.lign P Dientes completos - dientes posteriores formas G

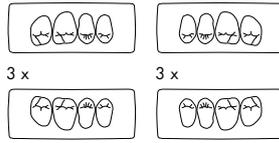


3 x

3 x

 = 12 Tablillas de dientes:
 Con la forma G, 1 x los tamaños:
 G2, G3 y G4

neo.lign P Dientes completos - dientes posteriores formas L

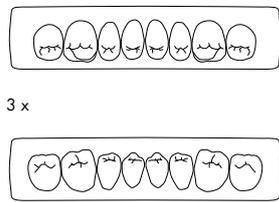

3 x


3 x

 = 6 Tablillas de dientes:
 Con la forma L, 1 x los tamaños:
 L2, L3 y L4

REF NL28for28

neo.lign Surtido de 28 (sólo válido en Alemania, y solo 1 por cliente)

neo.lign A Dientes completos - dientes anteriores

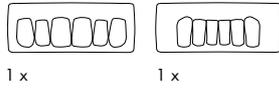


1 x

1 x

 = 2 Tablillas de dientes: Formas de
 los dientes anteriores elegidas por el
 usuario → véase la caja

neo.lign P Dientes completos - dientes posteriores, formas L

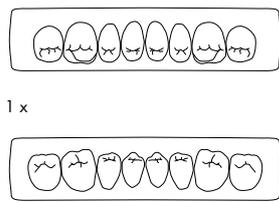

1 x

1 x

 = 2 Tablillas de dientes:
 dientes posteriores, con la forma L
 uno de cada de entre los tamaños:
 L2 / L3 / L4

REF NLUPSET2


neo.lign A & P Upgrade Set

neo.lign A Dientes completos - dientes anteriores




= 12 Tablillas de dientes

neo.lign P Dientes completos - dientes posteriores, formas G

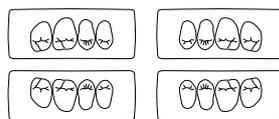

= 12 Tablillas de dientes

neo.lign P Dientes completos - dientes posteriores, formas L

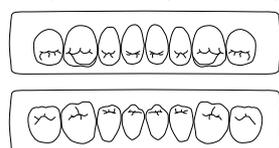
 Listado de todas las formas
 de neo.lign para maxilar superior
 e inferior más la tabla de
 correspondencias

 Se puede descargar de forma gratuita en la web
 www.visio.lign.com o pedir por teléfono llamando
 al 0034 961310561 **REF 0003290E**

Surtido de dientes en el color elegido

 → Colores clásicos de A a D y
 color bleach BL3, véase las páginas
 12 y 13

 neo.lign A y P Tablillas de dientes
 Dientes completos anteriores y poste-
 riores-con las formas elegidas por el
 usuario

→ véase la caja

 neo.lign P Tablillas de dientes
 Dientes completos posteriores-formas

 → Tablas con los tamaños,
 véase la página 13

 Surtido de un color elegido por el
 usuario

 → Colores clásicos de A a D y
 color bleach BL3, véase las páginas
 12 y 13.

 neo.lign P Tablillas de dientes
 Formas de los dientes completos
 posteriores

 → Tablas con los tamaños,
 véase la página 13.

 Surtido de un color elegido por el
 usuario

 → Colores clásicos de A a D y
 color bleach BL3, véase las páginas
 12 y 13.

 neo.lign A y P Tablillas de dientes
 Dientes completos anteriores y poste-
 riores con las formas elegidas por el
 usuario.

→ véase la caja .


 neo.lign P Tablillas de dientes
 Formas de los dientes completos poste-
 riores

 → Tablas con los tamaños,
 véase la página 13.

crea.lign Surtidos

REF CLIGNSET12 crea.lign Surtido de iniciación con portajeringas


crea.lign Portajeringas de plástico

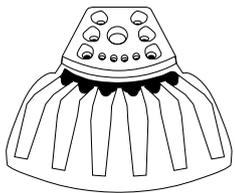

1 x

mango de sujeción para crea.lign Gel

12 x

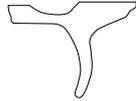

crea.lign Stain, 1,4 g

2 x



crea.lign Stains y Gel
Colores elegidos por el usuario
→ véase la página 23.

Pin Cover

2 x 10



Cánula de aplicación

2 x 10



crea.lign Gel, 5g

12 x



Modelling Liquid, 10 ml


1 x



REF CLIGNSETN crea.lign Surtido de introducción N

Mango de sujeción crea.lign Gel

3 x

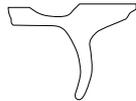

crea.lign Gel, 5g

10 x



crea.lign Gel
Colores elegidos por el usuario
→ véase la página 23.

REF CLIGNSETG Surtido para la estética del rojo y blanco

Caja de aluminio



1 x

Modelling Liquid
10 ml

1 x




visio.link
10 ml

1 x



Prótesis de muestra

2 x

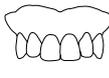

Cánula de aplicación

8 x




Mango de sujeción crea.lign Gel

1 x



crea.lign Gel Incisal, 5g

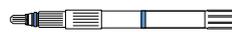

1 x I1 opal
1 x I2 blue

Bloque para mezclas,
grande

1 x



crea.lign Gel Modifier, 5g



1 x M1 beige
1 x M4 lila

crea.lign Gel GUM, 5g




1 x G1 light
1 x G2 rosa
1 x G3 pink
1 x G4 red

combo.lign Opaquer, 4 g



1 x GUM

Instrucciones para el
estratificado

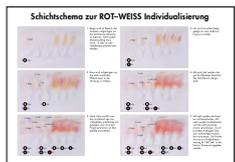

1 x

Pincel Magic Brush N°. 2




2 x

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.

crea.lign Surtidos

REF CLIGNSETFN crea.lign freestyle Set FN

crea.lign Portajeringas de plástico

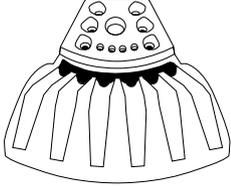

1 x

Modelling Liquid 10 ml



1 x

Pin Cover 2 x 10




Cánula de aplicación 2 x 10




6 x

Mango de sujeción crea.lign Gel

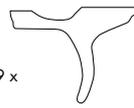


9 x

crea.lign Gel Incisal, 5g

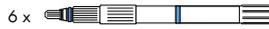


crea.lign Gel Modifier, 5g

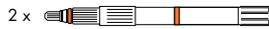

crea.lign Gel Dentin, 5g




crea.lign Stain, 1,4 g

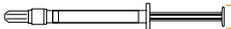

1 x S1 orange

1 x S2 brown

crea.lign Opaker, 4 g

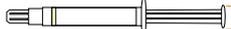

1 x Color 1

1 x Color 4

1 x Color 7

1 x Color 2

1 x Color 5

1 x Color 8

1 x Color 3

1 x Color 6

1 x GUM

crea.lign Incisal y Modifier
Colores elegidos por el usuario
→ véase la página 23.

crea.lign Dentin
en los 16 colores clásicos A-D más 1 ud. en color bleach BL3
→ véase las páginas 12 y 13.

crea.lign Opaker
Tabla de correspondencia de colores
→ véase la página 50.

REF CLPNSET7 crea.lign Surtido de introducción Pasta 7 colores

1 x A2
1 x A3
1 x A3,5

1 x B2
1 x B3
1 x C3
1 x D3

crea.lign Pasta Dentin, 3g



Distribuidor giratorio



7 x

Información sobre crea.lign pasta
→ véase la página 23.

crea.lign freestyle Test Set

REF CLFKSETA20

○ A2

○

REF CLFKSETA30

○ A3

○

REF CLFKSETA35

○ A3,5



crea.lign Gel Dentin, 5g



crea.lign Pasta Dentin, 3g



crea.lign Gel Incisal, 5g



crea.lign Opaker, 4 g



Se suministra el crea.lign Gel Incisal y crea.lign Opaker de este Surtido en los colores elegidos del surtido (A2, A3 o A3.5).

crea.lign Surtidos

REF CLIGNSETFK crea.lign freestyle Surtido completo

Maletín de aluminio,
ancho 42,5 cm x alto 43,5 cm x profundo 20,5 cm



1 x

Modelling Liquid

10 ml

1 x



MKZ Primer

4 ml

1 x



visio.link

10 ml

1 x



MKZ EM-Activador

4 ml

1 x



Cuencos de un único uso

1 x 12



K-Primer

3 ml

1 x



Bloque para mezclas
pequeño

2 x



Espátula

1 x



El surtido contiene todos los colores disponibles de los siguientes componentes:


- crea.lign Opaker
- crea.lign pasta
 - Dentin (sólo disponible en Dentin)
- crea.lign Gel
 - Incisal
 - Transpa clear
 - Dentin
 - Modifier
 - GUM
- crea.lign Stains
- visio.paint

➔ véase las páginas 19, 22 y 23.

Primer y Activador

➔ véase la página 18.

crea.lign Portajeringas
acero inoxidable

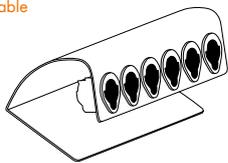

2 x

Pincel de un único uso

20 x



Portapinceles

1 x



crea.lign Pasta Dentin, 3g

17 x




Distribuidor giratorio

17 x



crea.lign paletas de colores, tonos dentin
(vacío)

1 x

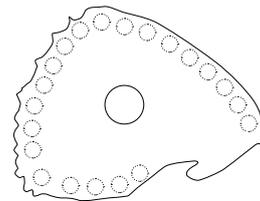

Mango de sujeción crea.lign Gel

12 x



Pin Cover

2 x 10



Cánula para aplicación

2 x 10



crea.lign Gel Incisal, 5g

8 x



crea.lign Gel Transpa clear, 5g

1 x



visio.paint Set

3 ml



crea.lign Stain, 1,4 g

2 x



crea.lign Opaker, 4 g

10 x



crea.lign Gel Dentin, 5g

17 x



crea.lign Gel Modifier, 5g

5 x




crea.lign Gel GUM, 5g

4 x




crea.lign paletas de colores Incisal, Stains & GUM
(vacío)

1 x

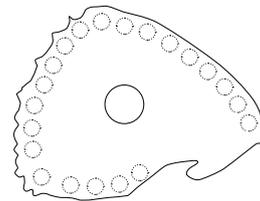

visio.lign Carpeta con información

con diferentes herramientas para imprimir, como, p. ej. el manual crea.lign Freestyle y un presentador de sobremesa con instrucciones para el estratificado mediante imágenes.

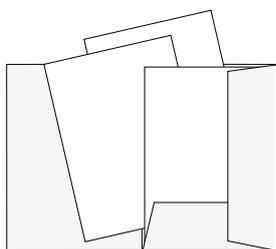

1 x

i visio.lign carpeta con información con diferentes herramientas para imprimir


Pedir gratuitamente llamando al nº de teléfono
0034 961310561 REF 0090060E

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.

crea.lign Surtidos

REF CLIGNSETFH crea.lign freestyle Set FH


crea.lign Portajeringas
acero inoxidable

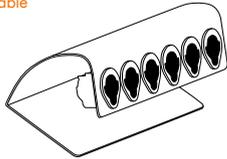

1 x

Pin Cover
2 x 10

crea.lign Opaker, 4 g

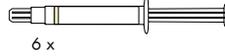

6 x

crea.lign Pasta Dentin, 3g




8 x

Cánula para aplicación

2 x 10



Mango de sujeción
crea.lign Gel

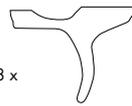


8 x

Distribuidor giratorio




8 x

crea.lign Gel Incisal, 5g

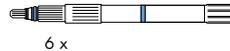

6 x

crea.lign Gel Modifier, 5g

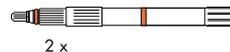

2 x

crea.lign Opaker
Colores elegidos por el usuario
→ véase la página 19.

crea.lign Pasta y Gel
Colores elegidos por el usuario
→ véase la página 23.

REF CLIGNSETA

Surtido para reparación Chipping, odontólogo

Caja de aluminio



1 x

MKZ Primer
4 ml



1 x

MKZ EM-Activador
4 ml




1 x

K-Primer
3 ml



1 x

Instrucciones del procesamiento adjuntas

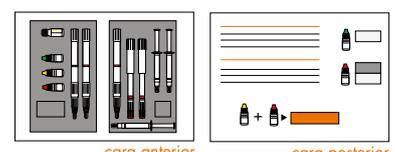


1 x

cara anterior

cara posterior

1 x A2
1 x A3

crea.lign Pasta Dentin, 3g

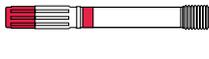

Distribuidor giratorio



8 x

Cuencos de un único uso

1 x 12



Pin Cover
1 x 10




Cánula para aplicación

1 x 10




crea.lign Gel Incisal, 5g

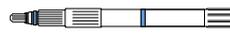

1 x E1

crea.lign Opaker, 4 g

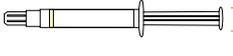

1 x Color 2
1 x Color 3


visio.link

10 ml

1 x




crea.lign Gel Dentin 5g

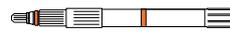

1 x A2
1 x A3

crea.lign Opaker Z,
liner para circonio 4 g

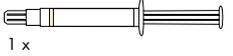

1 x

REF CLIGNSETT1

Surtido para reparación Chipping, Laboratorio dental, técnica dental

Maletín de plástico



1 x

MKZ Primer
4 ml



1 x

MKZ EM-Activador
4 ml




1 x

K-Primer
3 ml



1 x

Vista general imprimación: indicaciones y aplicaciones

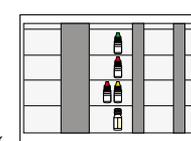

1 x

visio.link

10 ml

1 x




Cuencos de
un único uso


1 x 12



Surtidos de opáquer

REF OLIGNSET1 combo.lign Opaquer Set

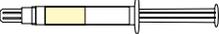combo.lign Catalizador, 4 g
2 x 

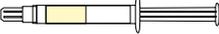combo.lign Opaquer, 4 g
]-  1 x light
 1 x medium
 1 x intensiv
 1 x GUM


combo.lign Opaquer
y Catalizador
→ véase la página 19.

i

Opaquer está escrito así a propósito, no se trata de un error.

La grafía "Opaquer" por un lado y "Opáquer" por el otro sirve en el sistema visio.lign de rasgo tipográfico adicional para diferenciar el crea.lign Opaker del combo.lign Opaquer.

REF CLFHOPSET crea.lign Opaker Set

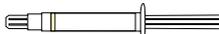crea.lign Opaker, 4 g
]-  1 x Color 1  1 x Color 6
 1 x Color 2  1 x Color 7
 1 x Color 3  1 x Color 8
 1 x Color 4  1 x GUM
 1 x Color 5

crea.lign Opaker
→ véase la página 19.

visio.paint Conjunto de pinturas

Pincel de un único uso
6 x 

Portapinceles
1 x 

visio.paint
3 ml ]-  1 x white
 1 x blue
 1 x black
 1 x ivory
 1 x ocher
 1 x ebony

visio.paint
→ véase la página 22 .

REF 54001250

visio.lign® Toolkit - Surtido para el repasado y acabado de composite

→ véase la página 41.

REF VLTOOLKIT

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.





Equipos, instrumental y accesorios

bre.Lux Power Unit



Polimerizador multifunción para la clínica y el laboratorio

Para el procesamiento de materiales de revestimiento y materiales dentales se requería hasta ahora varios equipos. Con el equipo bre.Lux Power Unit se puede procesar por primera vez todos los materiales habituales aplicando el concepto de un solo equipo.

- ➔ Ejemplo de aplicación de la lámpara manual, véase la página 39.
- ➔ bre.Lux: tiempos para la polimerización, véase la página 49.

LED-Power - energía concentrada y también manejable


bre.Lux Power Unit es un equipo fotopolimerizador con tecnología LED con un total de 21 Power LED, que abarcan una longitud de onda desde 370 a 500 nm. Los LED tienen una vida útil de unas 20.000 horas.

Además la lámpara manual bre.Lux LED N (con cable en espiral) está equipada para actuar en un ámbito de potencia de entre 370 a 500 nm.

Ventajas de bre.Lux Power Unit

- Fijación/polimerización inicial/intermedia y final, todo en el puesto de trabajo con un único equipo.
- 370 - 500 nm cubren suficientemente el ámbito de longitud de onda requerido, incluso para la lámpara manual.
- El retardo y la reducción de la potencia maximizan las características y los resultados de los materiales dentales.
- El retardo del inicio y el tiempo de polimerización pueden combinarse de forma sencilla.
- Gran volumen con capacidad para 2 modelos, aplicación de la luz de forma óptima y uniforme.
- Dispone de una manguera flexible con anillo de sujeción para la lámpara manual, que sirve a modo de "tercera mano" y permite trabajar con las dos manos.

visio.lign® Toolkit

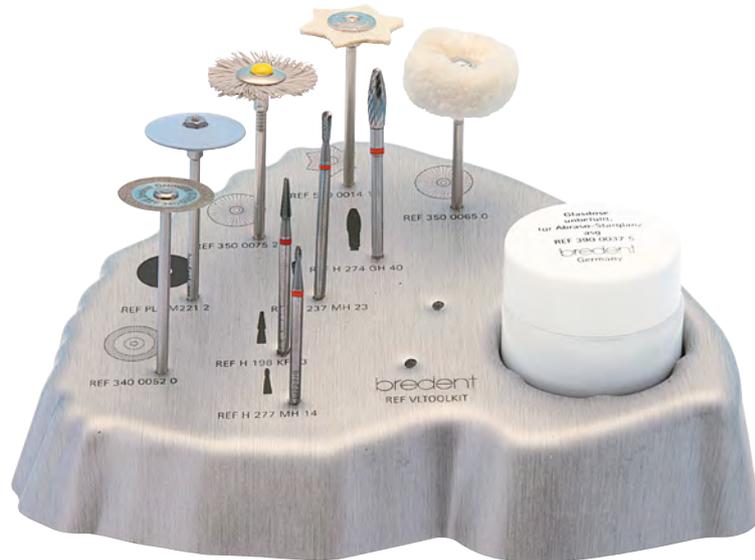

El toque final

El Surtido de herramientas visio.lign Toolkit se ha optimizado para realizar los repasados y acabados en composites, como p. ej. en trabajos con el sistema de visio.lign, y contiene fresas, cepillos y pastas para pulido para un acabado perfecto.

Superficies de composite como la cerámica

Al mecanizar los materiales del sistema visio.lign con el Surtido de herramientas visio.lign Toolkit se obtiene superficies resistentes a la placa y de colores sólidos con el mismo nivel de calidad y durabilidad que las superficies cerámicas.

Ventajas del Surtido de herramientas visio.lign® Toolkit

- Fresas con talón biselado consiguen superficies lisas que requieren menos esfuerzo para pulirlas.
- El Surtido contiene pasta para el pulido previo y el pulido de brillo intenso.
- Las herramientas están dispuestas en diferentes niveles para que resulten más fáciles de extraer.
- Bote de vidrio extraíble para evitar que se seque la pasta de pulido brillante.
- Pictogramas y números de referencia para el pedido impresos para una mejor organización.
- Quedan tres espacios libres para instrumental adicional.

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.

Instrumental y material fungible

crea.lign Portajeringas acero inoxidable



Portajeringas de acero inox. con guía de resina, sin accesorios, espacio para hasta 6 jeringas crea.lign.

Pincel de un único uso



Pincel de un único uso adaptable al portapinceles.

Espátula



La espátula sirve para la mezcla y aplicación generosa de material.

Bloque para mezclas grande



100 mm x 100 mm
100 hojas

crea.lign Portajeringas de plástico



En el portajeringas crea.lign puede disponerse hasta 12 jeringas crea.lign incluidos los mangos de sujeción.

Portapinceles



Los portapinceles sirven para sostener los pinceles de un único uso.

Cuencos de un único uso



Del tamaño de un dedo con escaso volumen para ahorrar al poner el Primer del sistema visio.lign (MKZ Primer, K-Primer, MKZ EM-Activador y visio.link)

Bloque para mezclas pequeño



50 mm x 35 mm
100 hojas

Instrumental y material fungible



Distribuidor giratorio para crea.lign Pasta

Distribuidor giratorio para todas las pastas crea.lign con el fin de conseguir una aplicación sencilla y precisa.



Mango de sujeción crea.lign Gel

El mango de sujeción para todas las jeringas de 5 g para aplicar gel crea.lign permite una aplicación sencilla y precisa.

i Mango de sujeción + Cánula para aplicación para jeringas para crea.lign Gel

El mango de sujeción se ha concebido especialmente para la jeringa con la que se aplica el gel crea.lign y facilita al usuario -junto con la cánula de aplicación- la dosificación exacta con una mano. Gracias al mango de sujeción, la jeringa se dispone limpia en la palma de la mano y el gel líquido puede dosificarse girando el elemento girador estriado con el dedo pulgar o índice de la misma mano. La otra mano queda libre para otros labores, p. ej. para sujetar el objeto que se está procesando.



Cánula de aplicación

Cánula de aplicación opaca adaptable a todas las jeringas de 5g para crea.lign



Pin Cover

Cofia de protección opaca, adaptable a todas las cánulas de aplicación



Thermo-Pen

El Thermo-Pen es un soplador de aire caliente con tecnología piezoeléctrica sin llama abierta. Permite calentar las carillas sin correr el riesgo de que se quemen. La temperatura necesaria para

deformar las carillas se encuentra en torno a los 250 °C. Al expandirlas resulta más fácil cubrir por ejemplo coronas telescópicas.

i Recomendamos el Thermo-Pen para la deformación termoplástica

1. Calentar la carilla

①

2. Doblar para abrir la carilla caliente

②

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.

Instrumental y material fungible



Dispensador de composite de fijación combo.lign

Dispensador para todos los cartuchos de combo.lign con el fin de aplicar el composite de fijación combo.lign de forma sencilla y precisa.

⚠ El cartucho no forma parte del suministro.



Cánulas para mezcla de composite de fijación combo.lign

Cánula para mezclas opaca para todos los composites de fijación combo.lign



Dispensador de siliconas visio.sil

Dispensador para todos los cartuchos de visio.sil, visio.sil ILT y visio.sil fix con el fin de aplicar la silicona de forma sencilla y precisa.

⚠ El cartucho no forma parte del suministro.



Cánulas para mezcla de silicona visio.sil fix Tamaño 1

Cánula para mezcla de silicona de llaves aplicada con trazo fino



Cánulas para mezcla de las siliconas visio.sil y visio.sil ILT Tamaño 4

Cánula para mezcla de las siliconas transparentes visio.sil

visio.lign® - Armario para dientes/Caja



Bandejas organizadoras para cajones



6 x jeringa para combo.lign Opaquer



9 x jeringa para crea.lign Opaker y/o jeringa para crea.lign pasta



24 x encajes para dientes novo.lign P y/o neo.lign P



36 x encajes para dientes novo.lign A y/o dientes neo.lign A




10 x jeringa para crea.lign Gel
3 x mango de sujeción



8 x jeringa para crea.lign Gel y/o jeringa para crea.lign pasta
2 x botellita líquido de unión por adhesión
1 x cartucho de silicona

Las imágenes no están representadas a escala real. Queda reservado el derecho a error y modificación.



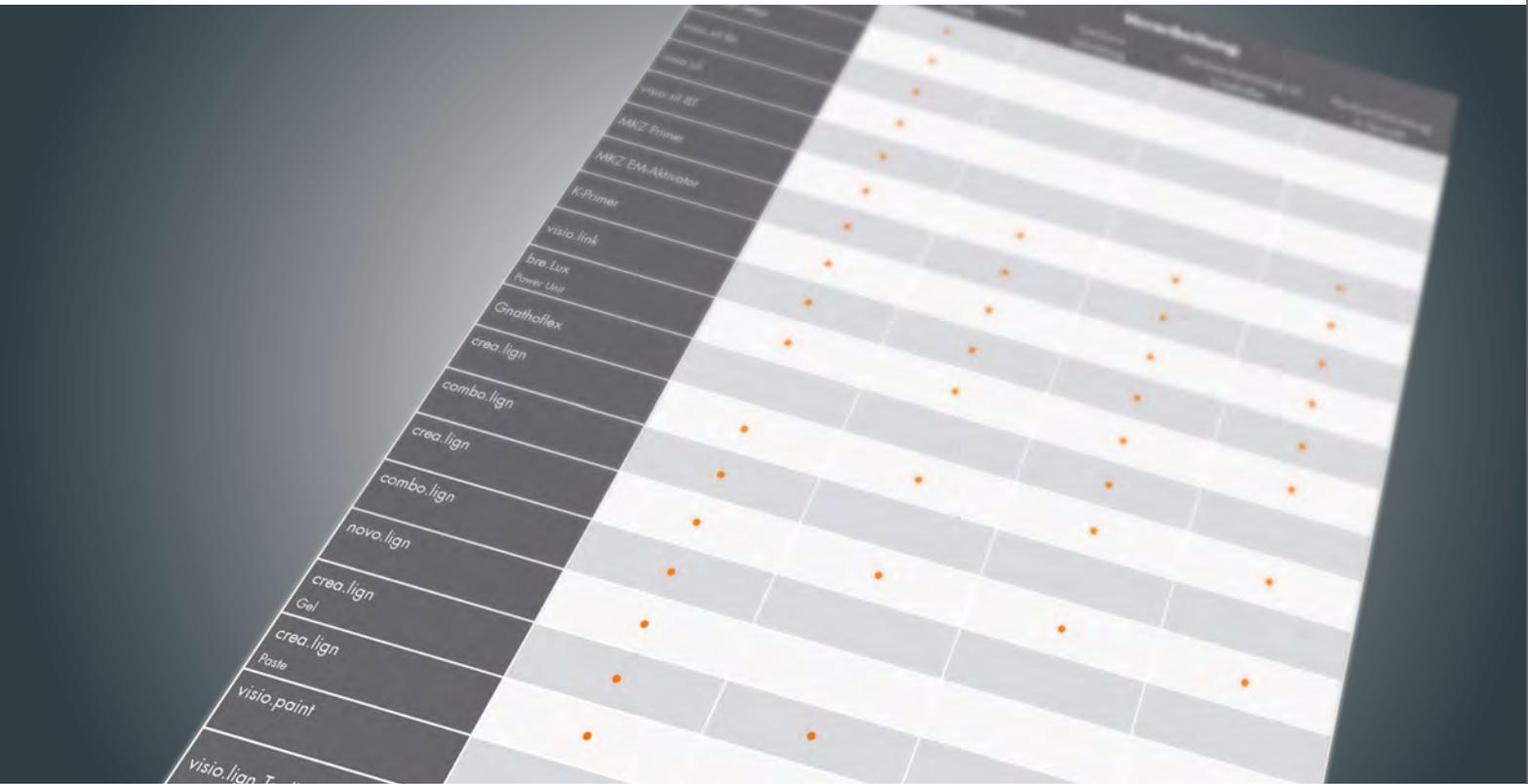

Tablas de combinaciones y correspondencias

Matriz para transformación del material

Material	Procesamiento			
	Recubrimiento con carillas	Estratificación libre	Estratificación libre con Gnathoflex	Estratificación libre en llave
beauty setup	•			
visio.sil fix	•			
visio.sil	•			
visio.sil ILT	•			•
MKZ Primer	•	•	•	•
MKZ EM-Activador	•	•	•	•
K-Primer	•	•	•	•
visio.link	•	•	•	•
bre.Lux Power Unit	•	•	•	•
Gnathoflex			•	
crea.lign Modelling Liquid	•	•	•	•
combo.lign Opaquer	•			
crea.lign Opaker	•	•	•	•
combo.lign Composite de fijación	•			
novo.lign carillas de revestimiento	•			
crea.lign Gel	•	•	•	•
crea.lign Pasta	•	•	•	•
visio.paint Colores para pintar	•	•	•	•
visio.lign Toolkit	•	•	•	•

bre.Lux Tiempos de fotopolimerización para componentes del sistema visio.lign®

Fabricante	Producto	bre.Lux LED N (lámpara manual)		bre.Lux Power Unit (equipo de mesa)		
		Polimerización final	Fijación / curado inicial	Polimerización intermedia	Polimerización final	Función de Angelier / reducción
bredent	visio.link	30 s	-	-	90 s	40 x (50 %)
bredent	combo.lign Composite de fijación	X	15 s	120 s	180 s	-
bredent	crea.lign Gel	X	15 s	180 s	360 s	20 x (50%)
bredent	crea.lign pasta	X	15 s	180 s	360 s	-
bredent	combo.lign Opaquer	X	15 s	180 s	180 s	-
bredent	crea.lign Opaker	-	30 s	180 s	360 s	-
bredent	visio.paint	-	40 s	90 s	90 s	-
bredent	crea.lign Stains	-	30 s	90 s	90 s	-

180 s Tiempo de polimerización

- No previsto

X Contraindicación

Equipos de fotopolimerización y tiempos de exposición para los componentes del sistema visio.lign® visio.link, combo.lign y crea.lign

Fabricante	Máquina	Longitud de onda en nm*	Tiempo de polimerización visio.link	Tiempo de polimerización combo.lign	Tiempo de polimerización crea.lign Gel combo.lign Opaquer crea.lign Opaker
bredent	bre.Lux Power Unit	370 - 500	90 s	180 s	6 min
Dentsply / Degudent	Triat, Triat 2000 Eclipse	400 - 500 k. A.	3 min 60 s	6 min 180 s	10 min 6 min
Heraeus Kulzer	Dentacolor XS, Uni XS Heraflash	320 - 520 320 - 520	90 s 90 s	180 s 180 s	6 min 6 min
GC	Labolight LV-III	380 - 490	2 min	5 min	10 min
Ivoclar	Targas Power Ofen	400 - 580	4 min	180 s	8 min
Vivadent	Lumanat 100	400 - 580	4 min	180 s	6 min
Schütz Dental	Spektra 2000	310 - 500	2 min	180 s	6 min
Shofu Dental	Solitilte EX	400 - 550	90 s	180 s	6 min
Kuraray Dental	CS 110	k. A.	2 min	5 min	8 min
Hager & Werken	Speed Labolight	320 - 550	90 s	180 s	8 min
3M ESPE	Visio BETA (nuevo P1 - P4) Visio BETA (antiguo U0 - U3)**	400 - 500 400 - 500	< 4 min (P2) 7 min (U1, U3)	7 min (P2) 15 min (U0)	15 min (P1) 15 min (U0)

* Datos del fabricante

** Se recomienda adquirir un juego de lámparas nuevo

Tablas de combinación de colores

crea.lign Opaker

	Colores del sistema crea.lign Opaker								
	Color 1	Color 2	Color 3	Color 4	Color 5	Color 6	Color 7	Color 8	GUM
Colores clásicos A - D	A1 / B2	A2	A3 / D3	B1 / C1 / BL3	C2 - C3 / D2 / D4	B3 / B4	A3.5	A4 / C4	-

combo.lign Opaquer

	Colores del sistema combo.lign Opaquer			
	light	medium	intensiv	GUM
Colores clásicos A - D	A1 - A3 / B1 - B2 / C1 - C2	A3.5 / B3 - B4 / D2 - D3	A4 / C3 - C4 / D4	-

crea.lign Dentin a Enamel

	Colores del sistema crea.lign Gel Enamel			
	E1	E2	E3	E4
crea.lign Dentin Gel y Pasta				
BL3*	-	-	-	-
Colores clásicos A - D				
A1	•			
A2		•		
A3		•		
A3.5			•	
A4				•
B1	•			
B2		•		
B3			•	
B4			•	
C1	•			
C2			•	
C3			•	
C4				•
D2	•			
D3			•	
D4			•	

* color bleach BL3 está armonizado con crea.lign Gel Incisal Universal



visio.lign®

Sistema de revestimiento

Los formularios para pedidos y una información más amplia sobre el sistema de revestimiento visio.lign® están disponibles en la web www.visio-lign.com

**"Todo aquello que va contra natura,
deja de existir a la larga."**

- Charles Darwin -

www.visio-lign.com

bredent

bre dent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel Garcia Thierfeldt · T: (+34) 961310561 / (+34) 607320666 · @: bre dentgroup@bre dent.es
bre dent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 56 · F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bre dent.com · @: info@bre dent.com



Salvo error y modificaciones 0095040E-20151124

novo.lign - Carillas de revestimiento

novo.lign A		Colores (sistema clásico A-D)																	
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
Anterior		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40	
Maxilar superior		Introduzca la cantidad para el pedido																	
Forma	Cont.	Introduzca la cantidad para el pedido																	
C43	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
A44	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
F44	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
I45	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
H46	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
S46	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
I47	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
D48	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
M48	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
D49	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
B51	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
K53	Juego de 2 (13, 23)																		
	Juego de 4 (12, 11, 21, 22)																		
	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		
Maxilar inferior		Introduzca la cantidad para el pedido																	
Forma	Cont.	Introduzca la cantidad para el pedido																	
T35	Juego de 2 (43, 33)																		
	Juego de 4 (42, 41, 31, 32)																		
	Juego de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)																		
D38	Juego de 2 (43, 33)																		
	Juego de 4 (42, 41, 31, 32)																		
	Juego de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)																		
D41	Juego de 2 (43, 33)																		
	Juego de 4 (42, 41, 31, 32)																		
	Juego de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)																		

novo.lign P posterior, formas G, W y L → veáse la hoja **2**

Remitente (sello)

Número de cliente

Fecha y firma

novo.lign Carillas de revestimiento

novo.lign P		Colores (sistema clásico A-D)																
Posterior		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Multifuncional		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
Forma	Cont.	Introduzca la cantidad para el pedido																
G3		Introduzca la cantidad para el pedido																
1 G3	1° cuadrante (14, 15, 16, 17)																	
2 G3	2° cuadrante (24, 25, 26, 27)																	
3 G3	3° cuadrante (34, 35, 36, 37)																	
4 G3	4° cuadrante (44, 45, 46, 47)																	
G4		Introduzca la cantidad para el pedido																
1 G4	1° cuadrante (14, 15, 16, 17)																	
2 G4	2° cuadrante (24, 25, 26, 27)																	
3 G4	3° cuadrante (34, 35, 36, 37)																	
4 G4	4° cuadrante (44, 45, 46, 47)																	

novo.lign P		Colores (sistema clásico A-D)																
Posterior		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Técnica de coronas y puentes		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
Form	Cont.	Introduzca la cantidad para el pedido																
W3		Introduzca la cantidad para el pedido																
1 W3	1° cuadrante (14, 15, 16, 17)																	
2 W3	2° cuadrante (24, 25, 26, 27)																	
3 W3	3° cuadrante (34, 35, 36, 37)																	
4 W3	4° cuadrante (44, 45, 46, 47)																	
W4		Introduzca la cantidad para el pedido																
1 W4	1° cuadrante (14, 15, 16, 17)																	
2 W4	2° cuadrante (24, 25, 26, 27)																	
3 W4	3° cuadrante (34, 35, 36, 37)																	
4 W4	4° cuadrante (44, 45, 46, 47)																	
W5		Introduzca la cantidad para el pedido																
1 W5	1° cuadrante (14, 15, 16, 17)																	
2 W5	2° cuadrante (24, 25, 26, 27)																	
3 W5	3° cuadrante (34, 35, 36, 37)																	
4 W5	4° cuadrante (44, 45, 46, 47)																	

novo.lign P		Colores (sistema clásico A-D)													
Posterior		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
Prótesis totales		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40
Forma	Cont.	Introduzca la cantidad para el pedido													
L2		Introduzca la cantidad para el pedido													
Maxilar superior	Conjunto de 6 (16, 15, 14, 24, 25, 26)														
Maxilar inferior	Conjunto de 6 (46, 45, 44, 34, 35, 36)														
L3		Introduzca la cantidad para el pedido													
Maxilar superior	Conjunto de 6 (16, 15, 14, 24, 25, 26)														
Maxilar inferior	Conjunto de 6 (46, 45, 44, 34, 35, 36)														

Suministro previsto a partir de junio de 2015

Salvo error y modificaciones

Remitente (sello)

Número de cliente

Fecha y firma

3 neo.lign Dientes completos

neo.lign A		Colores (sistema clásico A-D)																
Anterior		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Maxilar superior		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
Forma	Cont.	Introduzca la cantidad para el pedido																
C43	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
A44	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
F44	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
I45	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
H46	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
S46	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
I47	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
D48	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
M48	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
D49	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
B51	Juego de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)																	
Maxilar inferior		Colores (sistema clásico A-D)																
Forma		Cont.																
		Introduzca la cantidad para el pedido																
T33	Juego de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)																	
T35	Juego de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)																	
D38	Juego de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)																	
D41	Juego de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)																	

neo.lign P		Colores (sistema clásico A-D)																
Posterior		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Multifuncional		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
Forma	Cont.	Introduzca la cantidad para el pedido																
G2	Introduzca la cantidad para el pedido																	
1 G2	1° cuadrante (14, 15, 16, 17)																	
2 G2	2° cuadrante (24, 25, 26, 27)																	
3 G2	3° cuadrante (34, 35, 36, 37)																	
4 G2	4° cuadrante (44, 45, 46, 47)																	
G3	Introduzca la cantidad para el pedido																	
1 G3	1° cuadrante (14, 15, 16, 17)																	
2 G3	2° cuadrante (24, 25, 26, 27)																	
3 G3	3° cuadrante (34, 35, 36, 37)																	
4 G3	4° cuadrante (44, 45, 46, 47)																	
G4	Introduzca la cantidad para el pedido																	
1 G4	1° cuadrante (14, 15, 16, 17)																	
2 G4	2° cuadrante (24, 25, 26, 27)																	
3 G4	3° cuadrante (34, 35, 36, 37)																	
4 G4	4° cuadrante (44, 45, 46, 47)																	

neo.lign P		Colores (sistema clásico A-D)																
Posterior		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Prótesis totales		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
Forma	Cont.	Introduzca la cantidad para el pedido																
L2	Introduzca la cantidad para el pedido																	
Maxilar superior	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)																	
Maxilar inferior	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)																	
L3	Introduzca la cantidad para el pedido																	
Maxilar superior	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)																	
Maxilar inferior	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)																	
L4	Introduzca la cantidad para el pedido																	
Maxilar superior	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)																	
Maxilar inferior	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)																	

Remitente (sello)

Número de cliente

Fecha y firma

4 Gel

crea.lign Gel Dentin	Cont.	REF	Cantidad
BL3	5 g	CLFNDBL3	
A1	5 g	CLFNDA10	
A2	5 g	CLFNDA20	
A3	5 g	CLFNDA30	
A3.5	5 g	CLFNDA35	
A4	5 g	CLFNDA40	
B1	5 g	CLFNDB10	
B2	5 g	CLFNDB20	
B3	5 g	CLFNDB30	
B4	5 g	CLFNDB40	
C1	5 g	CLFNDC10	
C2	5 g	CLFNDC20	
C3	5 g	CLFNDC30	
C4	5 g	CLFNDC40	
D2	5 g	CLFNDD20	
D3	5 g	CLFNDD30	
D4	5 g	CLFNDD40	

crea.lign Gel Transpa	Cont.	REF	Cantidad
clear	5 g	CLFNOOT1	

crea.lign Gel Modifier	Cont.	REF	Cantidad
M1 beige	5 g	CLFN00M1	
M2 oliv	5 g	CLFN00M2	
M3 caramel	5 g	CLFN00M3	
M4 lila	5 g	CLFN00M4	
M5 umbra	5 g	CLFN00M5	

crea.lign Gel Enamel / Incisal	Cont.	REF	Cantidad
E1	5 g	CLFN00E1	
E2	5 g	CLFN00E2	
E3	5 g	CLFN00E3	
E4	5 g	CLFN00E4	
I1 opal	5 g	CLFN00I1	
I2 blue	5 g	CLFN00I2	
I3 rose	5 g	CLFN00I3	
I4 universal	5 g	CLFN00I4	

crea.lign Gel GUM	Cont.	REF	Cantidad
G1 light	5 g	CLFN00G1	
G2 rosa	5 g	CLFN00G2	
G3 pink	5 g	CLFN00G3	
G4 red	5 g	CLFN00G4	

crea.lign Stains	Cont.	REF	Cantidad
S1 orange	1,4 g	CLFN00S1	
S2 brown	1,4 g	CLFN00S2	

Mango | Distribuidor giratorio

Mango	Cont.	REF	Cantidad
para crea.lign Gel (blanco)	1 ud.	32000442	
para crea.lign Gel con lámpara UV LED (negro)	1 ud.	32000445	
Lámpara UV LED para mango por crea.lign Gel	1 ud.	32000446	

Distribuidor giratorio	Cont.	REF	Cantidad
para crea.lign Paste	1 ud.	32000444	

Pasta

crea.lign paste Dentin	Cont.	REF	Cantidad
BL3	3 g	CLPNDBL3	
A1	3 g	CLPNDA10	
A2	3 g	CLPNDA20	
A3	3 g	CLPNDA30	
A3.5	3 g	CLPNDA35	
A4	3 g	CLPNDA40	
B1	3 g	CLPNDB10	
B2	3 g	CLPNDB20	
B3	3 g	CLPNDB30	
B4	3 g	CLPNDB40	
C1	3 g	CLPNDC10	
C2	3 g	CLPNDC20	
C3	3 g	CLPNDC30	
C4	3 g	CLPNDC40	
D2	3 g	CLPNDD20	
D3	3 g	CLPNDD30	
D4	3 g	CLPNDD40	

Líquido

Liquid	Cont.	REF	Cantidad
crea.lign Modelling Liquid	10 ml	CLFMOD10	

Paletas de colores

crea.lign - Paletas de colores	Cont.	REF	Cantidad
dentin shade (sin rellenar)	1 ud.	9925CSLA	
Incisal, Stains y GUM (sin rellenar)	1 ud.	9925CSLB	

Colores para pintar

visio.paint	Cont.	REF	Cantidad
white	3 ml	54001251	
blue	3 ml	54001252	
black	3 ml	54001253	
ivory	3 ml	54001254	
ocher	3 ml	54001255	
ebony	3 ml	54001256	

Instrumental | Accesorios

crea.lign Gel - Portajeringas	Cont.	REF	Cantidad
Acero inox., para 6 jeringas	1 ud.	32000960	
Resina, para 12 jeringas	1 ud.	32000443	

Instrumental y accesorios	Cont.	REF	Cantidad
Pincel de un único uso	100 uds.	33001142	
Portapinceles (blanca)	12 uds.	33001149	
Espátula (blanca)	100 uds.	33001143	
Cuencos de un solo uso	12 uds.	23000130	
Bloc para mezclas (grande, 100 hojas)	1 ud.	32000460	
Bloc para mezclas (pequeño, 100 hojas)	10 uds.	33001144	
Cánulas para la aplicación + Pin Cover ¹⁾ para crea.lign Gel	10+10 uds.	32000940	
Pin Cover ¹⁾	50 uds.	32000950	

más instrumental y accesorios → véase la hoja

5

Remitente (sello)

Número de cliente

Fecha y firma

5 Ceras

beauty Setup Cera	Cont.	REF	Cantidad
■ clara	25 g	43000300	
■ oscura	25 g	43000310	

Primer

Bonder	Cont.	REF	Cantidad
MKZ Primer <i>(Composite con estructuras de metal)</i>	4 ml	MKZ02004	
MKZ EM-Activador <i>(para metales nobles) aplicación sólo en combinación con MKZ Primer</i>	4 ml	MKZEM004	
K-Primer <i>(Composite con estructuras de cerámica de óxido)</i>	3 ml	APK25003	
visio.link <i>(Composite con resinas)</i>	10 ml	VLPMMMA10	

Siliconas

visio.sil Siliconas	Cont.	REF	Cantidad
visio.sil <i>(transparent, 60 SH)</i>	50 ml	54001200	
visio.sil fix <i>(gelb, trazado fino, 55 SH)</i>	50 ml	54001300	
visio.sil ILT <i>(transparent, 75 SH)</i>	12 uds.	54001400	
Dispenser para visio.sil Siliconas	1 ud.	32000440	
Cánula de mezclado para visio.sil fix <i>(tamaño 1)</i>	12 uds.	32000451	
Cánula de mezclado para visio.sil und visio.sil ILT <i>(tamaño 4)</i>	12 uds.	32000457	

crea.lign Opaker

crea.lign Opaker	Cont.	REF	Cantidad
■ Color 1 (A1, B2)	4 g	CLFHOP01	
■ Color 2 (A2)	4 g	CLFHOP02	
■ Color 3 (A3, D3)	4 g	CLFHOP03	
■ Color 4 (B1, C1, BL3)	4 g	CLFHOP04	
■ Color 5 (C2, C3, D2, D4)	4 g	CLFHOP05	
■ Color 6 (B3, B4)	4 g	CLFHOP06	
■ Color 7 (A4, C4)	4 g	CLFHOP07	
■ Color 8 (A4, C4)	4 g	CLFHOP08	
■ GUM	4 g	CLFHOGUM	
crea.lign Opaker Z	Cont.	REF	Cantidad
Liner para circonio <i>(transparente)</i>	4 g	CLFHOP0Z	

combo.lign Opaquer

combo.lign Opaquer	Cont.	REF	Cantidad
■ light (A1-A3, B1-B2, C2, C1)	4 g	CO1X4OPL	
■ medium (A3.5, B3-B4, D2, D3)	4 g	CO1X4OPM	
■ intensiv (A4, C3-C4, D4)	4 g	CO1X4OPI	
■ GUM	4 g	CO1X4OPG	
combo.lign Opaquer catalizador	Cont.	REF	Cantidad
para todos los colores	4 g	CO1X4KAT	

combo.lign Composite de fijación

		Colores (sistema clásico A-D)																	
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	-
		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40	GUM
combo.lign Composite de fijación	Cont.	Introduzca la cantidad para el pedido																	
	8 g																		

Instrumental | Accesorios

Toolkit Envases de recambio	Cont.	REF	Cantidad
crea.lign Surface Cleaner	125 ml	43000600	
Acrypol Pasta para pulir	170 g	52000170	
Abraso-Starglanz 	2 x 50 ml	52000163	
Diatit Fresa de carburo de tungsteno 	1 ud.	D198KF23	
Fresa de carburo de tungsteno 	1 ud.	H237MH23	
Fresa de carburo de tungsteno 	1 ud.	H277MH14	
Fresa de carburo de tungsteno	1 ud.	H274GH40	
Quick-Mandrell <i>(tamaño 2)</i>	10 uds.	36001153	
Ceragum lenteja <i>(mediana)</i>	12 uds.	PLKM2212	
Disco diamantado	1 ud.	34000520	
Abraso-fix cepillo redondo	8 uds.	35000752	
Disco pulidor de algodón	15 uds.	35000650	
Cepillo hexagonal	15 uds.	52000141	
Envase de vidrio para Abraso-Starglanz <i>(sin rellenar)</i>	1 ud.	39000375	

combo.lign Accesorios	Cont.	REF	Cantidad
Dispensador para combo.lign Composite de fijación	1 ud.	32000441	
Cánula de mezclado para combo.lign Composite de fijación	10 uds.	COMKG210	

bre.Lux Power Unit	Cont.	REF	Cantidad
Equipo de polimerización	1 ud.	14000970	
<ul style="list-style-type: none"> • bre.Lux LED N <i>(lámpara manual con cable en espiral)</i> • bre.Lux UpDown • Manguera flexible • Cable de red 			

Thermo Pen	Cont.	REF	Cantidad
Soplador de aire caliente con piezo Technik	1 ud.	11001470	

Armario para dientes

visio.lign® Armario para dientes/caja	Cont.	REF	Cantidad
Incluye organizadores	1 ud.	VLIGNBOX1	

Remitente (sello)

Número de cliente

Fecha y firma

6 crea.lign Sets

de 8

crea.lign Conjunto de iniciación Paste 7 colores	Cont.	Cantidad
REF CLPNSET7		
crea.lign Paste Dentin ■ A2, ■ A3, ■ A3.5, ■ B2, ■ B3, ■ C3, ■ D3	1 x 3 g de cada	
Distribuidor giratorio crea.lign Paste	7 unidades	

crea.lign freestyle Test Set	Color	REF	Cantidad
<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 3 g crea.lign Paste Dentin • 1 x 5 g crea.lign Gel Dentin • 1 x 5 g crea.lign Gel Incisal • 1 x 4 g crea.lign Opaker <i>crea.lign Incisal y crea.lign Opaker se suministran armonizados con el color elegido para el surtido.</i>	■ A2	CLFKSETA20	
	■ A3	CLFKSETA30	
	■ A3.5	CLFKSETA35	

crea.lign freestyle Conjunto completo	Cont.	Cantidad
REF CLIGNSETFK		
Maletín de aluminio (ancho 42,5 cm x alto 43,5 cm x profundo 20,5 cm)	1 unidad	
crea.lign Paste Dentin ■ A1, ■ A2, ■ A3, ■ A3.5, ■ A4, ■ B1, ■ B2, ■ B3, ■ B4, ■ C1, ■ C2, ■ C3, ■ C4, ■ D2, ■ D3, ■ D4 y ■ BL3	1 x 3 g de cada	
crea.lign Gel Dentin ■ A1, ■ A2, ■ A3, ■ A3.5, ■ A4, ■ B1, ■ B2, ■ B3, ■ B4, ■ C1, ■ C2, ■ C3, ■ C4, ■ D2, ■ D3, ■ D4 y ■ BL3	1 x 5 g de cada	
crea.lign Gel Incisal ■ E1, ■ E2, ■ E3, ■ E4, ■ I1 opal, ■ I2 blue, ■ I3 rose, ■ I4 universal	1 x 5 g de cada	
crea.lign Gel GUM ■ G1 light, ■ G2 rosa, ■ G3 pink, ■ G4 red	1 x 5 g de cada	
crea.lign Gel Transpa ■ clear	1 x 5 g de cada	
crea.lign Gel Modifier ■ M1 beige, ■ M2 olive, ■ M3 caramel, ■ M4 lila, ■ M5 umbra	1 x 5 g de cada	
crea.lign Stain ■ S1 orange, ■ S2 brown	1 x 1,4 g de cada	
crea.lign Opaker ■ 1 (A1/B2), ■ 2 (A2), ■ 3 (A3/D3), ■ 4 (B1/BL3/C1), ■ 5 (C2/C3/D2/D4), ■ 6 (B3/B4), ■ 7 (A3.5), ■ 8 (A4/C4), ■ GUM	1 x 4 g de cada	
crea.lign Opaker Z (liner para circonio) transparente	1 x 4 g de cada	
crea.lign Modelling Liquid	1 x 10 ml	
visio.paint Conjunto pinturas	1 surtido	
crea.lign Gel Cánulas para la aplicación + Pin Cover (cofias de protección)	2 x 10 unidades de cada	
visio.link (unión mediante adhesión de composite con resinas)	1 x 10 ml	
K-Primer (unión mediante adhesión de composite con metales no nobles y cerámica)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (unión mediante adhesión de composite con metales no nobles y cerámica de óxido)	1 x 4 ml	
MKZ EM-Activador (unión mediante adhesión de composite con metales nobles, 1:1 en combinación con MKZ Primer)	1 x 4 ml	
Mango crea.lign Gel	12 unidades	
crea.lign Portajeringas (acero inox.)	2 unidades	
Distribuidor giratorio crea.lign Paste	17 unidades	
Bloc para mezclas (pequeño)	2 unidades	
Espátula	1 unidad	
Pincel de un único uso	20 unidades	
Portapinceles	1 unidad	
Cuencos de un solo uso	1 x 12 unidades	
crea.lign Paletas de colores: dentin shade (sin rellenar) y Incisal, Stains & GUM (sin rellenar)	1 unidad de cada	
visio.lign Carpeta de información	1 unidad	

Remitente (sello)

Número de cliente

Fecha y firma

Salvo error y modificaciones

Conjunto estética del rojo y blanco	Cont.	Cantidad
REF CLIGNSETG		
Caja de aluminio	1 unidad	
crea.lign Gel Incisal ■ I1 opal, ■ I2 blue	1 x 5 g de cada	
crea.lign Gel GUM ■ G1 light, ■ G2 rosa, ■ G3 pink, ■ G4 red	1 x 5 g de cada	
crea.lign Gel Modifier ■ M1 beige, ■ M4 lila	1 x 5 g de cada	
combo.lign Opaquer ■ GUM	1 x 4 g	
crea.lign Modelling Liquid	1 x 10 ml	
crea.lign Gel Cánulas para la aplicación	8 unidades	
visio.link (Unión por adhesión de composite con resinas)	1 x 10 ml	
MKZ Primer (Unión por adhesión de composite con metales no nobles y cerámica de óxido)	1 x 4 ml	
Mango crea.lign Gel	1 unidad	
Bloc para mezclas (grande)	1 unidad	
Pincel Magic Brush, n.º. 2	2 unidades	
Instrucciones para el estratificado	1 unidad	
Prótesis de muestra	2 unidades	

Chipping Repair Kit, odontólogo	Cont.	Cantidad
REF CLIGNSETA		
Caja de aluminio	1 unidad	
visio.link (Unión por adhesión de composite con resinas)	1 x 10 ml	
K-Primer (Unión por adhesión de composite con metales no nobles y cerámica)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (Unión por adhesión de composite con de composite con metales no nobles y cerámica de óxido)	1 x 4 ml	
MKZ EM-Activador (Unión por adhesión de composite con EM, 1:1 en combinación con MKZ Primer)	1 x 4 ml	
crea.lign Paste Dentin ■ A2, ■ A3	1 x 3 g de cada	
crea.lign Gel Dentin ■ A2, ■ A3	1 x 5 g de cada	
crea.lign Gel Incisal ■ E1	1 x 5 g de cada	
crea.lign Opaker ■ 2 (A2), ■ 3 (A3/D3)	1 x 4 g de cada	
crea.lign Opaker Z (Liner para circonio) transparent	1 x 4 g de cada	
Distribuidor giratorio crea.lign Paste	17 unidades	
crea.lign Gel Cánulas para la aplicación + Pin Cover (cofias de protección)	2 x 10 unidades de cada	
Cuencos de un solo uso	1 x 12 unidades	
Carpeta con instrucciones de procesamiento	1 unidad	

Chipping Repair Kit, técnico dental	Cont.	Cantidad
REF CLIGNSETT1		
Maletín de resina	1 unidad	
visio.link (Unión por adhesión de composite con resinas)	1 x 10 ml	
K-Primer (Unión por adhesión de composite con metales no nobles y cerámica)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (Unión por adhesión de composite con metales no nobles y cerámica de óxido)	1 x 4 ml	
MKZ EM-Activador (Unión por adhesión de composite con metales nobles, 1:1 en combinación con MKZ Primer)	1 x 4 ml	
Descripción imprimación - Indicaciones y aplicación	1 unidad	
Cuencos de un solo uso	1 x 12 unidades	

Remitente (sello)

Número de cliente

Fecha y firma

8 Conjuntos de opáquer Sets

de 8

combo.lign Opaquer Set	Cont.	Cantidad
REF OLIGNSET1		
combo.lign Katalyst	2 x 4g	
combo.lign Opaquer ■ light, ■ medium, ■ intensiv, ■ GUM	1 x 4 g de cada	

crea.lign Opaker Set	Cont.	Cantidad
REF CLFHOPSET		
crea.lign Opaker ■ 1 (A1/B2), ■ 2 (A2), ■ 3 (A3/D3), ■ 4 (B1/C1/BL3), ■ 5 (C2/C3/D2/D4), ■ 6 (B3/B4), ■ 7 (A3.5), ■ 8 (A4/C4), ■ GUM	1 x 4 g de cada	

Conjunto pinturas

visio.paint Conjunto de colores	Cont.	Cantidad
REF 54001250		
Colores ◊ white, ◊ blue, ◊ black, ◊ ivory, ◊ ocher, ◊ ebony	1 x 3 ml de cada	
Pincel de un único uso	6 unidades	
Portapinceles	1 unidad	
Bloc para mezclas (pequeño)	1 unidad	

Conjunto trabajos de acabado

visio.lign® Toolkit	Cont.	Cantidad
REF VLTOOLKIT		
Conjunto para trabajos de acabado de composite	1 surtido	

Toolkit paquetes para rellenar → véase la hoja

5

Remitente (sello)

Número de cliente

Fecha y firma

Conjuntos del sistema para un máximo de flexibilidad

Algunos de los conjuntos del sistema visio.lign le ofrecen una flexibilidad muy grande. Hallará una gran variedad tanto en las carillas de revestimiento novo.lign y los dientes completos neo.lign, como en la composición de las formas de dientes, así como también en la selección de los colores.

De igual modo encontrará en estos conjuntos los componentes correspondientes de crea.lign y combo.lign (p. ej. opáquer, composite de fijación, gel y pasta) y la opción de elegir los colores que desee de la completa y variada gama de colores.

Por ello quedamos a su disposición para asesorarle sobre las posibles combinaciones de que dispone en cada uno de los conjuntos y le rogamos que realice sus pedidos de los surtidos que aparecen en la lista llamando **por teléfono al (+34) 961310561 o contactando con su comercial de bredent.**

Encontrará los detalles sobre la cantidad y variedad de los componentes de todos los conjuntos mencionados en la "Presentación del sistema visio.lign" en el apartado "Conjuntos del sistema".

visio.lign® Sets	REF
visio.lign® Starterkit 2	VLIGNSET2
visio.lign® Starterkit 3	VLIGNSET3
visio.lign® Starterkit 4	VLIGNSET4
visio.lign® Upgrade Set N	VLUPSETN
visio.lign® Set PRVC	VLIGNPRVC
novo.lign Sets	REF
novo.lign A & P Carta de formas vivas	VLIGNPRVN
novo.lign P Upgrade Set	VLIGNSETP
neo.lign Sets	REF
neo.lign A & P Carta de formasvivas	VLIGNPRVT
neo.lign Conjunto de 28 piezas (sólo disponible en Alemania y exclusivamente 1 x por cliente!)	NL28FOR28
neo.lign A & P Upgrade Set	NLUPSET2
crea.lign Sets	REF
crea.lign Starterkit con portajeringas (resina)	CLIGNSET12
crea.lign Starterkit N	CLIGNSETN
crea.lign freestyle Set FN	CLIGNSETFN
crea.lign freestyle Set FH	CLIGNSETFH