




R-080087

E.....	DECANTADORA CON BOLSA RECOGEDORA.....	6
GB....	DECANTER WITH COLLECTION BAG.....	7
F.....	BAC DE DÉCANTATION AVEC SAC RÉCUPÉRATEUR.....	8
D.....	GIPSABSCHIEDER MIT FOLIENEINSATZ.....	9
P.....	DECANTADORA COM SACO.....	10
I.....	DECANTATRICE CON SACCHETTO DI RACCOLTA.....	11

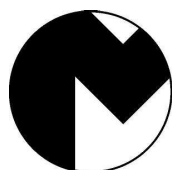

MESTRA®

TALLERES MESTRAITUA S.L.


Txori-Erri Etorbidea, 60

Tfno. + 34 94 453 03 88 Fax + 34 94 471 17 25

E-mail: mestra@mestra.es - www.mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA

Rev. 17/03/09

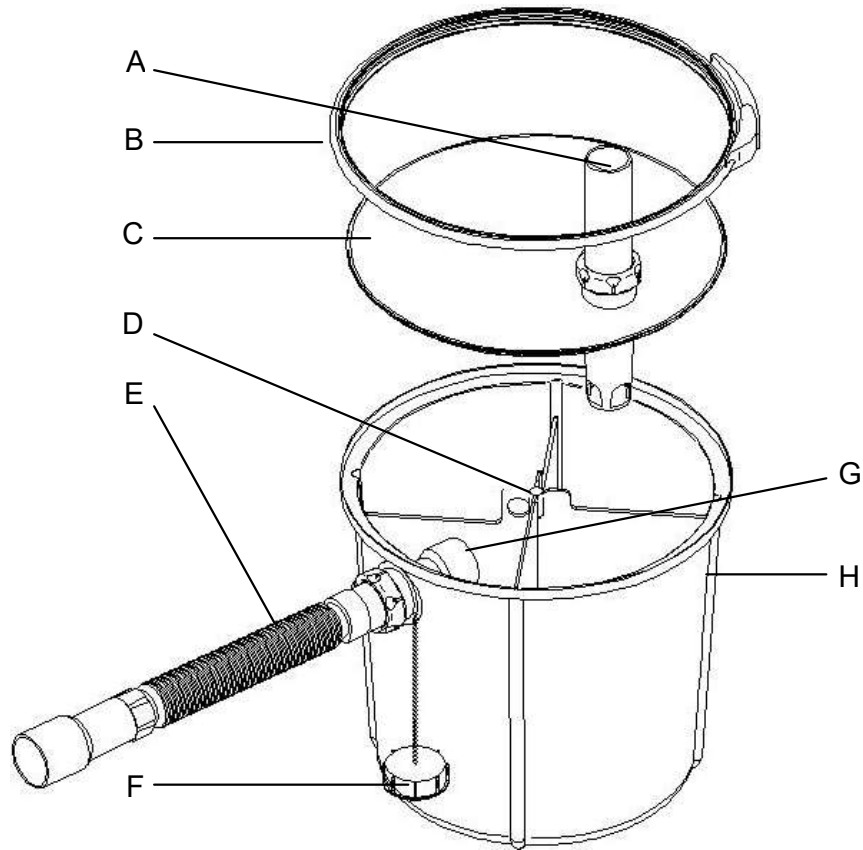

R-080087

A	Entrada / Inlet / <i>Entrée</i> / Einlaufstutzen / Junção de entrada / Ingresso
B	Abrazadera / Clamp / <i>Anneau de cerclage</i> / Spannring / Braçadeira / Ghiera
C	Tapa / Lid / <i>Couvercle</i> / Deckel / Tampa / Coperchio
D	Separadores / Separators / <i>Séparateurs</i> / Trenneinsatz / Separadores / <i>Separatori</i>
E	Salida / Outlet / <i>Sortie</i> / Auslaufstutzen / Junção de saída / <i>Raccordo di uscita</i>
F	Tapón / Plug / <i>Bouchon</i> / Verschlusskappe / Tampa / Tappo
G	Adaptador del desagüe / Drainpipe adaptor / <i>Adaptateur d'écoulement</i> / Auslaufadapter / Adaptador do escoamento / <i>Adattatore scarico</i>
H	Cuba / Tank / <i>Cuve</i> / Behälter / Cuba / Vaschetta

R-080085-02

Bolsas de repuesto (20 unidades)
Spare bags (20 units)
Sacs de remplacement (20 unités)
 Ersatztüten (20 Stück)
Sacos de reserva (20 unidades)
Sacchetti di ricambio (20 unità)



1



2



3



4




5



6


CIERRE DE LA TAPA
CLOSING THE LID
FERMETURE DU COUVERCLE
SCHLIESSEN DES DECKELS
FECHO DA TAMPA
CHIUSURA DEL COPERCHIO

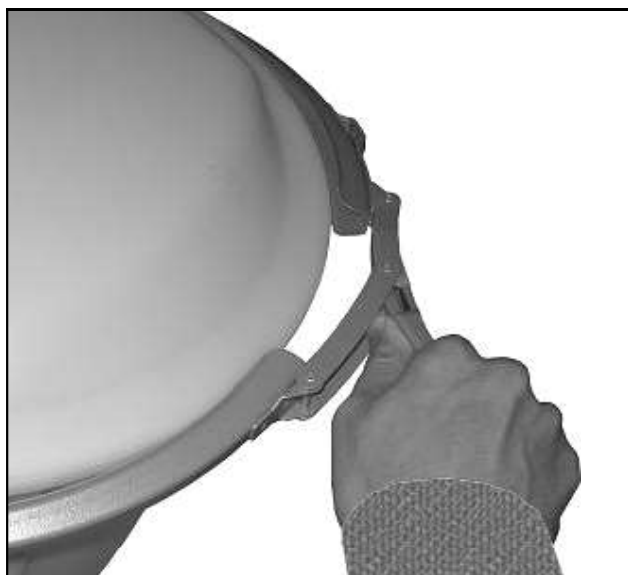

7



8

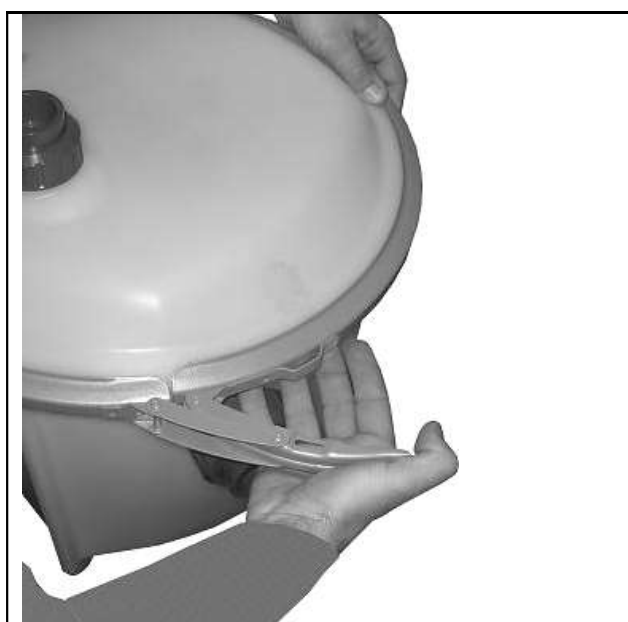

9




10



11

CAMBIO DE LA BOLSA
REPLACING THE BAG
REPLACEMENT DU SAC
WECHSEL DES FOLIENEINSATZES
SUBSTITUIÇÃO DO SACO
SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO

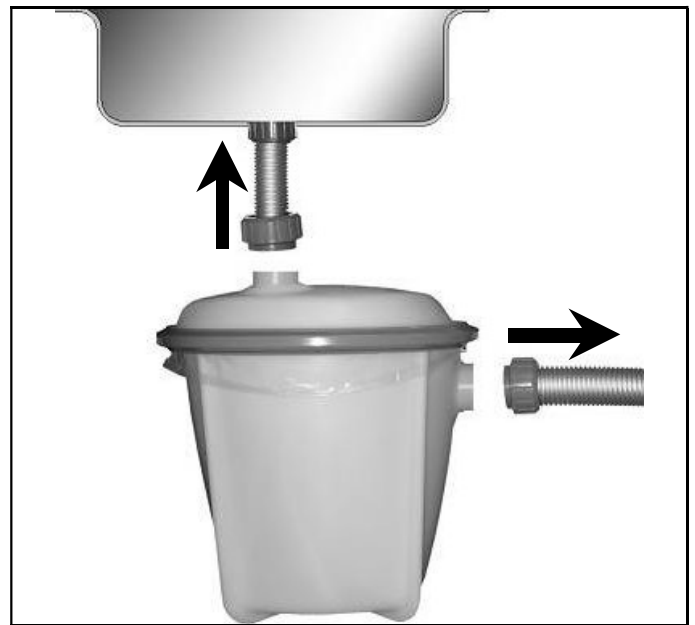


12



13



14

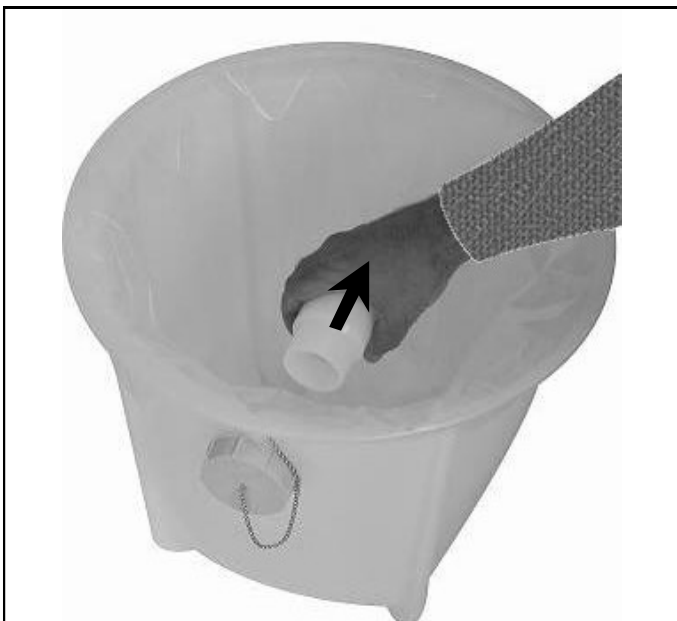

15



16



La decantadora R-080087 ha sido fabricada en plástico resistente. El diseño está específicamente estudiado para conseguir una rápida y sencilla limpieza porque la suciedad queda recogida en una bolsa de plástico. El cierre hermético de su tapa impide la propagación de malos olores. Su tamaño y forma han sido pensados para una sencilla instalación bajo el fregadero.

INSTALACIÓN (Ver figuras en páginas iniciales)

1. Introducir la bolsa en la cuba doblando el borde hacia el exterior.
2. Insertar los cartabones separadores en las ranuras hasta el fondo de la cuba. La cámara más baja debe quedar en la salida de la decantadora.
3. Abocar el casquillo en el orificio de salida de la cuba y presionar con fuerza estirando la bolsa.
4. Utilizar un cuchillo para abrir el orificio de desagüe en la bolsa.
5. Una vez abierto el orificio de desagüe en la bolsa, apretar el casquillo y dejarlo ajustado.
6. Colocar la tapa introduciendo la entrada de agua en la cámara más alta.

Para asegurar un óptimo funcionamiento de la decantadora y evitar que se produzcan deformaciones, es conveniente seguir las siguientes instrucciones para cerrar la tapa:

7. Presentar la tapa de la decantadora sobre la cuba de forma que quede bien centrada y encajada en todo su perímetro. Abrir completamente la abrazadera para colocarla cómodamente alrededor de la decantadora.
8. Soltar el cierre de la abrazadera y asegurarse de que la tapa continúa bien centrada y encajada antes de apretarla.
9. Apretar la abrazadera poco a poco y con cuidado de que la tapa no se desencaje.
10. Cerrar completamente la abrazadera. La tapa debe haber quedado bien encajada en la cuba.
11. Situar la decantadora bajo el fregadero. Conectar la salida del fregadero a la entrada de la decantadora y la salida de esta a un desagüe. En caso de dificultad para encontrar la manera óptima de adaptar la decantadora al sistema de desagüe de su laboratorio, consulte a un profesional de la fontanería. **NOTA:** El tubo flexible que se suministra no debe utilizarse como sifón.



LIMPIEZA

12. Para sacar la decantadora de debajo del fregadero, aflojar las roscas de entrada y salida.
13. Colocar el tapón roscado para cerrar el orificio de desagüe. Abrir la tapa y retirar el agua sobrante.
14. Extraer el separador.
15. Extraer el adaptador de la salida de desagüe.
16. Atar la bolsa por debajo de la abertura del desagüe y eliminar los desechos.


NOTA: Cuando se limpie la decantadora comprobar que no existen obstrucciones en los tubos de desagüe.

PRECAUCIONES

- ◆ Escoja para el emplazamiento de la decantadora una superficie rígida, plana, y bien nivelada
- ◆ Evite la presencia de cables o circuitos eléctricos en las inmediaciones de la decantadora. La distancia de seguridad mínima recomendada debería ser de por lo menos 1 m.
- ◆ Realice las operaciones de transporte y movimiento de la decantadora con mucho cuidado. Evite riesgos de vuelco de la decantadora.
- ◆ En caso de dificultad para encontrar la manera óptima de adaptar la decantadora al sistema de desagüe de su laboratorio, consulte a un profesional de la fontanería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad:	14 L
Diámetro:	350 mm
Alto:	345 mm

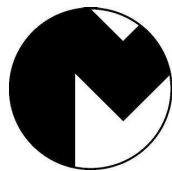

MESTRA[®]

TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60

Tfno. + 34 94 453 03 88 Fax + 34 94 471 17 25

E-mail: mestra@mestra.es - www.mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA