

Smile Line ☺
made in switzerland

Esta cita tiene sin duda todo el sentido para usted, por la mutación tecnológica que arrancó vertiginosamente hace algunos años en nuestro sector.

Para no dejarse sobrepasar rápidamente, cada uno debió tomar decisiones y hacer elecciones para diseñar su futuro.

Son ante todo y esencialmente elecciones tecnológicas. Pero no sólo. Estas elecciones se hacen también diariamente a nivel humano y de comunicación. Más que nunca, si el objetivo es la búsqueda de la excelencia, una colaboración estrecha y un verdadero trabajo en equipo entre el laboratorio, el dentista y el paciente será el centro de sus preocupaciones.

Es con esta fuerte convicción por lo que este año también Smile Line innova con nuevas herramientas y accesorios completamente inéditos y únicos, que descubrirá en las páginas de este catálogo.

Si el éxito para cualquier empresa pasa indiscutiblemente por la innovación y la promoción de sus proyectos, la pasión es la esencia para su implementación. Sobre todo deseamos que esta pasión te acompañe a diario como sucede en Smile Line!

Con nuestros mejores deseos de éxito y deseándoles unos agradables descubrimientos durante la lectura.

Olivier Schaeren
CEO Smile Line SA

« El futuro no es lo que va a llegarnos sino lo que nosotros vamos a hacer »

[Henri Bergson 1859-1941]



I CREATE...
WE CREATE

www.smileline.ch

SMILELINE 2019



ÍNDICE

INSTRUMENTOS PARA CERÁMICA

Mangos y módulos de base	06-07
Módulos pinceles e instrumentos para cerámica	08-09
Set de instrumentos para cerámica	10
Equilibrium	11
FlexMount	12-13
Pinceles N.era	14-15
Pinceles N.era bRRRush	16-17
Pinceles N.era [Njoy]	18
H ₂ O	19

BANDEJAS PARA CERÁMICA

Wet'n'Dry SlimPad	22-23
Tinto	24-25
SlimPad PRO-B, build-up	26-27
SlimPad PRO-S, stains	28-29

CERA Y COMPOSITE

SlimPad PRO-C, compo	32
Compo-Brush	33
Set y módulos instrumentos para composites	34
Moldes silicona N-Architect Anteriors & Posteriors	35
Set y módulos instrumentos universales y cera	36
Ceras High Precision	37

ACCESORIOS IMPLANTOLOGÍA

Destornilladores para implantes, laboratorio	40-41
Sidekick, destornilladores para implantes, clínica	42-43

TOMA DE COLOR, FOTOGRAFÍA

Smile Lite	46-47
Smile Lite MDP	48-51
Flexipalette	52
Photo-Cad	53
My Shade Guide	54
Sampler	55

ACCESORIOS

Pinza « Implant base holder »	58
United Colors by D.Vinci	59
Micro-Vibes 2	60-61
Golden Section	62-63
venerME	64
Holding Gel	65
Zir.Care	66
Organ.ez	67

CENTRO DE FORMACIÓN

68

INSTRUMENTOS PARA CERÁMICA

SMILELINE 2019



100% modulares

Excepcionales, exclusivos e individualizables, **INSTRUMENT by Smile Line** es una línea de instrumentos 100% modulares que permite una personalización casi ilimitada.

En 10 páginas, os revelamos lo mejor en instrumentos para el ceramista, empezando por estas dos páginas con las diferentes posibilidades a nivel de los mangos. Todos están fabricados con gran esmero a partir de **materiales nobles y de máxima calidad**: aluminio anodizado negro, fibra de carbono y tres diferentes maderas preciosas.

¡Sólo tiene que elegir el que mejor corresponda a su personalidad y carácter!

MANGOS

ALUMINIO
ANODIZADO
NEGRO

FIBRA DE
CARBONO

PALISSANDRO

ÉBANO

MADERA DE
VIOLETA



4000-As
Mango corto

4000-A
Mango estándar

4000-AH
Mango largo cónico

4100-CAs
Mango de fibra de carbono, corto

4100-CA
Mango de fibra de carbono, estándar

4100-CAL
Mango de fibra de carbono, largo

4100-PAs
Mango en palissandro, corto

4100-PA
Mango en palissandro, estándar

4100-PAL
Mango en palissandro, largo

4100-EBs
Mango en ébano, corto

4100-EB
Mango en ébano, estándar

4100-EBL
Mango en ébano, largo

4100-VIs
Mango en madera de violeta, corto

4100-VI
Mango en madera de violeta, estándar

4100-VIL
Mango en madera de violeta, largo

4000-BC
Cabo troncado

4000-B
Cabo

4000-BS
Cabo corto

**MÓDULOS PINCELES E
INSTRUMENTOS PARA CERÁMICA**

SMILELINE 2019

La más elevada calidad,
la más gran precisión

Nuestros pinceles Kolinsky en pelo puro de marta, seleccionado y testado, son vuestros aliados diarios en la búsqueda de la excelencia.

Nuestras espátulas, los instrumentos de aplicación o de corte, las pinzas, se han vuelto indispensables para miles de ceramistas en todo el mundo.



4100-XR Pincel Kolinsky regular #8-R	4100-XLT Pincel Kolinsky largo #8-LT	4000-V6 Módulo Pincel Kolinsky #6	4000-W Módulo Pincel Kolinsky #4	4000-MOS Módulo pincel Kolinsky #3, S. Mosconi	4000-N Módulo Pincel para glaze #2	4000-O Módulo Pincel para stains #3/0	4000-VD Módulo Pincel DUST	FL-4020-ZR Espátula en zirconio sobre conector flexible	4000-OP1 Módulo instrumento p. opaco, bola pequeña Al ₂ O ₃	4000-OP2 Módulo instrumento p. opaco, bola grande Al ₂ O ₃	4000-R Módulo condensador, eyector de pines	4000-Q Módulo cuchara larga	4000-SG1-N Módulo Soft-Grip, simple	4000-SG2-N Módulo Soft-Grip, doble	4000-SG3-N Módulo Soft-Grip, mini
		4001-V6 [2 pzas] Puntas de pincel #6	4001-W [3 pzas] Puntas de pincel #4		4001-N [5 pzas] Puntas de pincel #2	4001-O [5 pzas] Puntas de pincel #3/0		4000-ZR Módulo espátula en zirconio	4001-OP1 Bolas pequeñas [2 pzas]	4001-OP2 Bolas grandes [2 pzas]			4010-SG1-N Instrumento completo 4000-A + BS + SG1-N	4010-SG2-N Instrumento completo 4000-A + BS + SG2-N	4010-SG3-N Instrumento completo 4000-A + BS + SG3-N



4000-LO Módulo Pincel p. opaco, grande	4000-M Módulo Pincel p. opaco	4000-Sy0 Módulo Pincel SynTec #0	4000-Sy3/0 Módulo Pincel SynTec #3/0	4000-STE Módulo sonda de profundidad para cerámica cruda, graduada 0,5 mm	4000-GUM-S Módulo pincel para textura de gingiva. Suave	4000-GUM-H Módulo pincel para textura de gingiva. Duro	4000-P5 Módulo espátula flexible 0. 1 mm	4000-P Módulo cuchilla para porcelana	4000-CR Módulo ensanchador	Surtido de cuchillas					4001-ZN Surtido de cuchillas, 1 pza de cada una
4001-LO [5 pzas] Puntas de pincel	4001-M [5 pzas] Puntas de pincel	4001-Sy0 [5 pzas] Puntas SynTec #0	4001-Sy3/0 [5 pzas] Puntas SynTec #3/0							4001-P Cuchilla estándar 75 µ [5 pzas]	4001-P1 Cuchilla microsierra 75 µ [5 pzas]	4001-P2 Cuchilla hueca 75 µ [5 pzas]	4001-P3 Cuchilla neutra 75 µ [5 pzas]	4001-P4 Ensanchador [3 pzas]	4001-P5 Espátula flexible 0. 1 mm [5 pzas]

PORCELAIN INSTRUMENT SET

Sencillamente
porque amáis
vuestro trabajo

SMILELINE 2019



El «Set Cerámica» se adapta a sus necesidades. Parte de las herramientas son desarrollos e innovaciones de Smile Line (espátula ZR, instrumento para el opaquer, Soft-Grip, instrumento de condensación). Algunos son más tradicionales como por ejemplo, las herramientas de corte (cuchillas extra-finas, lima, cucharilla).

Finalmente, la calidad de los pinceles Kolinsky es la más alta y está severamente controlada de acuerdo a las nuevas normas estrictas implementadas con nuestro socio.

Estamos convencidos de que este set de herramientas perdurará durante años. ¡Despertará envidia a su alrededor!

Información adicional: para aquellos que prefieran crear sus obras de arte dental con nuestros exclusivos pinceles N.era, existe una «configuración N.era» en lugar de Kolinsky. Puede encontrar el número de artículo al lado.

Descripción	Art. nº
Set de instrumentos para cerámica: pinceles Kolinsky de la más alta calidad (#8-R y #3/0), en total 8 herramientas montadas en 6 mangos de aluminio anodizado negro, surtido de cuchillas de corte, paño de microfibra	14050-KN
Set de instrumentos para cerámica: pinceles en fibra N.era (#8-R y #1), en total 8 herramientas montadas en 6 mangos de aluminio anodizado negro, surtido de cuchillas de corte, paño de microfibra	14050-NN
Caja vacía de cartón laminado, cierre con imanes, paño de microfibra	14999



EQUILIBRIUM

Un soporte de
sobre-mesa digno de
vuestros instrumentos
personales



Descripción	Art. nº
Equilibrium, soporte de sobre-mesa (sólo)	14002


Equilibrium asocia acero inoxidable, aluminio y paneles compuestos. Su **geometría y construcción inclinada** le confieren una elegancia única y original. ¡Prominente sobre vuestra mesa, no dejará a nadie indiferente!



FLEXMOUNT

Simple – como la mayoría de las grandes ideas

SMILELINE 2019

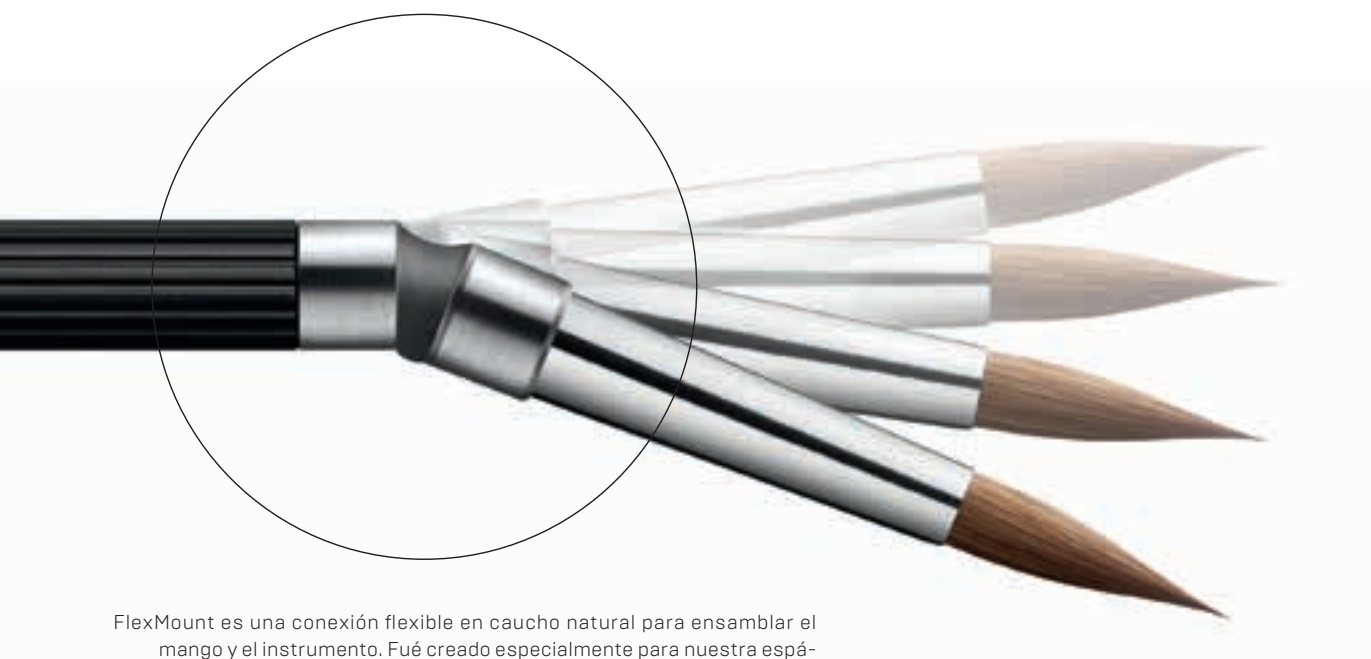

FlexMount es una conexión flexible en caucho natural para ensamblar el mango y el instrumento. Fué creado especialmente para nuestra espátula ZR en circonio y para nuestros pinceles para cerámica.

En un pincel Smile Line: una pequeña presión con el dedo activa la parte delantera del pincel y, gracias a la acción de FlexMount, **«acelera» la humedad necesaria desde el centro hasta la punta del pincel.** La punta también se reformará.

Sobre la espátula ZR: el FlexMount funciona **como un amortiguador** y proporciona la máxima comodidad y seguridad durante la mezcla de la porcelana o de los maquillajes.



CONECTOR FLEXIBLE



FL-4000
Conector flexible
(2 pzas)

PUNTAS



4000-ZR
Modulo espátula
en circonio



4201-SF-8
Punta pincel N.era
#8, virola corta
(2 pzas)



4000-SF-8R
Punta pincel
Kolinsky #8R,
virola corta



4000-SF-6
Punta pincel
Kolinsky #6,
virola corta



FL-4020-ZR
Espátula en
zirconio sobre
conector flexible



FL-4220-SF-8
Punta pincel N.era
#8, virola corta,sobre
conector flexible



FL-4020-SF-8R
Punta pincel
Kolinsky #8R,
virola corta, sobre
conector flexible




FL-4020-SF-6
Punta pincel
Kolinsky #6,
virola corta, sobre
conector flexible


CONECTOR FLEXIBLE CON PUNTAS

Nota: para aumentar la elasticidad de la acción FlexMount, aconsejamos las nuevas puntas de pinceles «SF» (Short Ferrule) con virola más corta.

Para permitirnos aprovechar plenamente la tecnología FlexMount, os proponemos diferentes sets de instrumentos ya montados: cada uno contiene una espátula ZR y un pincel para cerámica.

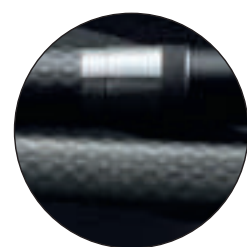

FIBRA DE CARBONO

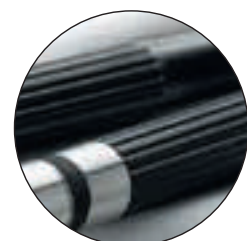

ALUMINIO ANODIZADO

SETS MANGOS EN FIBRA DE CARBONIO

	Art. n°
Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel Kolinsky #6 & espátula circonio) sobre conector flexible – Mangos en fibra de carbono	FL-14150-CA6
Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel Kolinsky #8R & espátula circonio) sobre conector flexible – Mangos en fibra de carbono	FL-14150-CABK
Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel N.era #8 & espátula circonio) sobre conector flexible – Mangos en fibra de carbono	FL-14150-CA8N

SETS MANGOS EN ALUMINIO ANODIZADO

	Art. n°
Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel Kolinsky #6 & espátula circonio) sobre conector flexible – Mangos en aluminio anodizado negro	FL-14150-6
Set de 2 instrumentos para cerámica (pincel Kolinsky #8R & espátula circonio) sobre conector flexible – Mangos en aluminio anodizado negro	FL-14150-8K
Set de 2 instrumentos para cerámica (pennello N.era #8 & espátula circonio) sobre conector flexible – Mangos en aluminio anodizado negro	FL-14150-8N

N.ERA BRUSHES

SMILELINE 2019

8-MACCHIATO 6-CAPPUCCINO 4-MOKA 1-RISTRETTO



4200-8 N.era #8 Pincel completo	4200-6 N.era #6 Pincel completo	4200-4 N.era #4 Pincel completo	4200-1 N.era #1 Pincel completo
4201-8 Puntas de reposición N.era #8 (2 pzas)	4201-6 Puntas de reposición N.era #6 (2 pzas)	4201-4 Puntas de reposición N.era #4 (2 pzas)	4201-1 Puntas de reposición N.era #1 (2 pzas)

Precisión en el montaje
de la cerámica: ¡supera los
límites conocidos!

N.era, como « nera » (negra en italiano, el color de su virola) o como « new era » (en inglés). Los pinceles N.era de Smile Line son innovadores, hechos de un filamento artificial nuevo, exclusivo y desconocido en la industria dental. Se trata de un filamento de tipo de poliamida que sufre varios tratamientos químicos especiales.

Os será indudablemente **difícil encontrar otro pincel que tenga al mismo tiempo una punta tan aguda, estable y « nerviosa »**. Los comentarios de nuestros laboratorios piloto y de numerosos usuarios están llenos de elogios y son muy entusiastas. Los pinceles N.era ofrecen una nueva comodidad de trabajo y **superan los límites conocidos hasta ahora en términos de precisión del montaje de la cerámica**.

Otra ventaja única: es suficiente pasar la punta del pincel N.era bajo vapor para regenerarla: saldrá como nueva. Esto hace que los pinceles N.era tengan una vida útil mucho más larga



4200-Asst
Set completo de 4 pinceles N.era:
8-Macchiato, 6-Cappuccino, 4-Moka, 1-Ristretto

Descripción	Art. nº
Mango aluminio - Macchiato	4000-AH-MAC
Mango aluminio - Cappuccino	4000-AH-CAP
Mango aluminio - Moka	4000-AH-MOK
Mango aluminio - Ristretto	4000-AH-RIS

N.ERA BRRRUSH

La línea bRRRush tiene la revolucionaria punta N.era, pero sobre el mango ha sido creada una «zona de vibración».

Moviendo la uña de su dedo índice hacia adelante y hacia atrás sobre esta superficie, se crea una microvibración que se propaga hasta el final mismo de la punta de su pincel. La pequeña porción de porcelana que está en su pincel se transformará en una pequeña gota, cuya humedad se encuentra en el exterior. Es muy fácil entonces aplicar la gota en el trabajo (ver el vídeo en nuestra web www.smileline.ch).

La ventaja de esta técnica es que queda mucho menos aire en la porcelana durante el trabajo de build-up, **sinónimo de menos porosidad en la porcelana después de la cocción.**

SMILELINE 2019



4200-bRRR-8 N.era bRRRush #8, pincel completo	4200-bRRR-6 N.era bRRRush #6, pincel completo	4200-bRRR-4 N.era bRRRush #4, pincel completo
4201-8 Puntas de reposición #8 (2 pzas)	4201-6 Puntas de reposición #6 (2 pzas)	4201-4 Puntas de reposición #4 (2 pzas)

Pre-condensar vuestras
masas cerámicas



Descripción	Art. nº
Mango aluminio N.era bRRRush	4000-AH-bRRR



4200-bRRR-1
N.era bRRRush #1,
pincel completo

4201-1
Puntas de reposición
#1, 2 pz



4200-bRRR-Asst
N.era bRRRush,
set completo:
pinceles #8, #6, #4, #1

[NJOY] N.ERA

La versión super-ligera del pincel N.era

A petición de algunos clientes, Smile Line ha completado el surtido de pinceles N.era con [Njoy]: ¡color, alegría y frescura, pero también pinceles extra-ligeros!

El mango [Njoy] es hueco, inyectado con ABS-termoplástico y sobre-moldado con una silicona suave para darle un toque muy agradable.

SU SET PERSONALIZADO

La filosofía [Njoy] le permite **componer su propio juego de pinceles según su gusto**. Sólo tiene que determinar el color que desea recibir para cada uno de los cuatro tamaños del set (números de artículo a la derecha). ¡Su distribuidor Smile Line le compondrá su set personalizado!

Importante: Los pinceles N.era [Njoy] no tienen puntas intercambiables. Smile Line escogió esta opción principalmente para disminuir el peso del instrumento y desde luego ahorramos en la fabricación del pincel, con un impacto favorable sobre su coste.



SMILELINE 2019

Mojito

#8 4200-MOJ-8 #4 4200-MOJ-4
#6 4200-MOJ-6 #1 4200-MOJ-1

Bloody Mary

#8 4200-BLO-8 #4 4200-BLO-4
#6 4200-BLO-6 #1 4200-BLO-1

Sex on the beach

#8 4200-SOB-8 #4 4200-SOB-4
#6 4200-SOB-6 #1 4200-SOB-1

Cosmopolitan

#8 4200-COS-8 #4 4200-COS-4
#6 4200-COS-6 #1 4200-COS-1

Blue Lagoon


#8 4200-LAG-8 #4 4200-LAG-4
#6 4200-LAG-6 #1 4200-LAG-1

Yellow cab

#8 4200-YEC-8 #4 4200-YEC-4
#6 4200-YEC-6 #1 4200-YEC-1

H₂O

Higiene, lógica, ergonomía

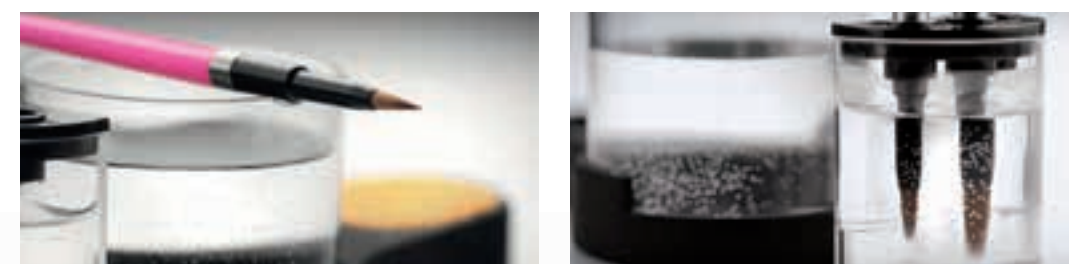

H₂O es el accesorio esencial que completa su puesto de trabajo de porcelana, a la derecha o a la izquierda de su bandeja. Esta estación universal le permite **aclarar su pincel** en agua limpia, **alisarlo** sobre una esponja viscosa para **hacer la punta lo más aguda posible** y finalmente **almacenarlo verticalmente**, bañado en agua, en un contenedor independiente para evitar que se seque.

Todos los accesorios H₂O son independientes, es decir que se puede cambiar el agua del contenedor principal sin necesidad de tocar el contenedor de almacenaje o viceversa.

Gracias al diseño de la base, se puede rotar el contenedor de almacenaje 60°, según su preferencia o por si usted es diestro o zurdo.



Descripción	Art. nº
H ₂ O set completo: base negra, contenedor redondo, contenedor de almacenaje con tapa, esponja de viscosa (2 pzas)	4400
Contenedor redondo	4410
Contenedor de almacenaje con tapa	4420
Esponjas viscosa (2 pzas)	4430

BANDEJAS PARA CERÁMICA



Plena conciencia



SLIM PAD

WET'N'DRY



SMILELINE 2019

Descripción	Art. nº
Wet'n'Dry SlimPad conjunto completo: 1 contenedor con tapa, placa de vidrio con ranuras, 10 tiras negras de PVA, solución NANO-hidrofóbica 15 ml	13090-WHITE
Wet'n'Dry SlimPad negra, set completo: 1 contenedor con tapa, placa de vidrio con ranuras, 10 tiras negras de PVA, solución NANO-hidrofóbica	13090-BLACK
Placa de vidrio de recambio 240 x 135 x 4 mm, 10 tiras negras de PVA, solución NANO-hidrofóbica 15 ml	13091
Wet'n'Dry, «The Black Ones», tiras negras de PVA, 10 pzas	11094-B
Solución NANO-hidrofóbica, 15 ml	1160

La nano-tecnología
a su servicio


Nuestro modelo SlimPad es la síntesis de todas las demandas que nos habéis comunicado muchos de vosotros. Y estamos muy orgullosos del resultado que os propone ahora nuestro team de design. Las especificaciones técnicas han sido totalmente respetadas:

- **Base de trabajo lo más fina posible y próxima o cercana a la superficie de trabajo: ¡10 mm de altura!**
- **Superficie de trabajo lo más cercana posible del usuario: 20 mm**
- **Muy compacta y con diseño minimalista**
- **Formato portátil y fácil para llevar consigo a un curso**
- **Apilable**
- **Tapa desmontable**
- **Superficie de trabajo de 240 x 135 mm**

La superficie de la Wet'n'Dry SlimPad es una placa de vidrio con seis ranuras, donde se insertan tiras negras de PVA que absorben el líquido desde el depósito. Vuestra cerámica, al contacto con las tiras húmedas, mantendrá una consistencia ideal días enteros, mientras que haya líquido en el depósito.

NANO-hydrophobic

Con vuestro set SlimPad recibiréis un recipiente de líquido «NANO –hydrophobic solution». Es un producto químico/mágico con el que se puede tratar la superficie de vidrio para reducir la tensión superficial. Resultado: **vuestras masas mantendrán la cohesión y quedarán compactas, y la superficie de trabajo más limpia.** ¡Una mayor comodidad de trabajo!

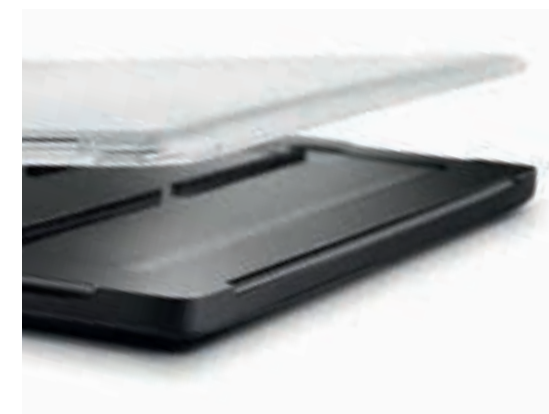

TINTO

SMILELINE 2019

Las bandejas de mezcla Tinto permiten almacenar productos pre-mezclados como por ejemplo maquillajes u opáquer en pasta, protegiéndolos del polvo. Aunque sea de concepción tradicional (placa seca realizada de polipropileno reforzado de fibra de vidrio), Tinto se distingue por un **diseño único, ergonómico y compacto**. La tapa está equipada con una ventana panorámica transparente en policarbonato que permite reconocer el contenido de las bandejas de un vistazo.

Tinto fue pensada para ser **apilada una sobre otra**, ahorrando mucho espacio: muy útil ahora que la mayoría de los laboratorios están equipados con **varias marcas de cerámicas**. Será también muy fácil indicar con un marcador sobre el lado de la bandeja la referencia del producto contenido.

Tinto está disponible en dos modelos. El primero con 9 huecos de 18 mm de diámetro y un hueco más pequeño para el líquido. El segundo modelo tiene 15 huecos de 14 mm de diámetro y dos huecos para el líquido. Las dimensiones de Tinto son de 118 x 118 x 25 mm.

Tinto se suministra con dos piezas, es decir o dos modelos idénticos, o un modelo de cada.

Compactas
y herméticas



Descripción	Art. nº
Tinto, set de 2 bandejas con 9 y 15 huecos	1300
Tinto, set de 2 bandejas con 9 huecos	1309
Tinto, set de 2 bandejas con 15 huecos	1315

SLIM PAD PRO - B build-up

BANDEJA PARA CERÁMICA

Egoísmo puro

Egoísmo puro. Apartarse de los caminos habituales. Ser curiosos. Preguntarse «porqué» o «porqué no». Todo eso hace parte de un enfoque, de una filosofía y de una elección consciente. Es lo que hace que Smile Line consiga imponer nuevas tendencias. Con pasión y entusiasmo. La SlimPad PRO es una nueva prueba. Es sin duda la bandeja más exclusiva del mercado. ¡Mucha gente le envidiará!

- Superficie de trabajo en vidrio templado, 115 x 204 mm, blanco o negro
- Sistema de hidratación Wet'n'Dry con tiras absorbentes
- Base y cubierta: fabricados con alta precisión en aluminio macizo
- Superficies: con un arenado delicado y anodizadas para un tacto muy suave
- Extremadamente fina: el espesor de la base es de sólo 5,6 mm (!)
- Ergonómica y muy compacta



SMILELINE 2019



Su SlimPad PRO a escala real 1:1 - Dimensiones 235 x 165 x 11 mm



Descripción

SlimPad PRO-B build-up, conjunto completo: contenedor con tapa, placa blanca de vidrio con ranuras, 10 tiras negras

Art. nº

15100-BW (white)

Placa blanca de vidrio con ranuras, 240 x 15 mm

15110-BW

SlimPad PRO-B build-up, conjunto completo: contenedor con tapa, placa negra de vidrio con ranuras, 10 tiras negras

15100-BB (black)

Placa negra de vidrio con ranuras, 240 x 15 mm

15110-BB

Tiras negras

15120-B

Estuche en fibra de PET reciclado para protección y transporte de SlimPad PRO (ver pág.29)

15999

SLIM PAD PRO - S stains

PLACA DE MEZCLA PARA STAINS CERÁMICA

Hasta ahora los «Stains» eran sólo el último toque del maquillaje. Actualmente con los nuevos materiales y tecnologías de fresado, la operación de «maquillaje» requiere una atención particular y representa claramente un valor añadido para el trabajo final.

La nueva SlimPad PRO-S fue concebida con esta filosofía, ofreciendo un número mayor de huecos para los maquillajes así como una superficie de mezcla generosa.

- Placa de mezcla blanca opaca, 115 x 204 mm
- 25 huecos, más amplia y confortable superficie de mezcla
- Prolonga la conservación de la consistencia de los colorantes
- Base y cubierta: fabricados con alta precisión en aluminio macizo
- Superficies: con un arenado delicado y anodizadas para un tacto muy suave
- Extremadamente fina: el espesor de la base es de sólo 5,6 mm (!)
- Ergonómica y muy compacta



Descripción	Art. n°
SlimPad PRO-S stains, conjunto completo: contenedor con tapa, placa blanca opaca con 25 huecos	15300-S
Placa de mezcla blanca opaca con 25 huecos	15310-S

SMILELINE 2019



15999
Estuche exclusivo, fabricado a partir de botellas PET recicladas. El complemento ideal para la SlimPad PRO (protección - transporte).



CERA Y COMPOSITE

SMILELINE 2019



Calidad superior
Made in Suiza

SLIM PAD PRO - C^{compo}

BANDEJA DE MEZCLA PARA COMPOSITES FOTOPOLIMERIZABLES

SlimPad PRO-C: la bandeja de mezcla excepcional y muy exclusiva para trabajar con composites fotopolimerizables.

- Vidrio bicolor: negro para preparación del composite y blanco para los colorantes
- Limpieza muy fácil: una vez endurecido, el material se puede quitar del vidrio sin dejar rastros, con la ayuda de una espátula o un bisturí
- Inserción de silicona antiadherente para el líquido a la derecha o a la izquierda (para diestros o zurdos) y pequeño contenedor con esponja para eliminar los excesos de líquido en el instrumento
- Base y cubierta: fabricados con alta precisión en aluminio macizo
- Superficies: con un arenado delicado y anodizadas para un tacto muy suave
- Extremadamente fina: el espesor de la base es de sólo 5,6 mm (!)
- Ergonómica y muy compacta



Descripción	Art. nº
SlimPad PRO-C compo, conjunto completo: contenedor con tapa, vidrio bicolor, inserción silicona con esponja	15200-C
Vidrio bicolor blanco y negro	15210-C
Inserción silicona y contenedor esponja	15220-C
Esponjas de reposición (5 pzas)	15230-C
SlimPad PRO, estuche en fibra de PET reciclado para protección y transporte de SlimPad PRO (ver pág. 29)	15999

SMILELINE 2019



COMPO-BRUSH

COMPOSITE STAINING

Los pinceles Compo-Brush, están desarrollados con Styleitaliano y están destinados para los maquillajes de composites.

Sus fibra sintética negra permite **una precisión extrema con el mejor contraste**: una calidad de trabajo claramente superior a los pinceles habituales usados para la misma aplicación.

El set está compuesto por dos pinceles con puntas recambiables gracias a su anclaje por fricción en el mango de aluminio anodizado.

El pincel #000 Posterior es fácilmente plegable para tener un acceso ergonómico a las zonas posteriores.

Pinceles y puntas están disponibles también por separado.

Descripción	Art. nº
Compo-Brush, set de 2 pinceles y puntas de reposición (2x ANT & 2x POST)	4650-Set
Compo-Brush, puntas #000 para Posteriores (50 pzas)	4651-POST
Compo-Brush, puntas planas para Anteriores (50 pzas)	4651-ANT



4650-POST
Compo-Brush, pincel completo #000 para Posteriores

4651-ANT
Compo-Brush, pincel completo plano para Anteriores



STYLE ITALIANO
SHADE GUIDES

COMPOSITE INSTRUMENT SET

MÓDULOS INSTRUMENTOS PARA COMPOSITOS



4000-S1
Módulo espátula p.composites #1

4000-S2
Módulo espátula p.composites #2

4000-S3
Módulo espátula p.composites #3

4000-R1
Módulo caucho #1, Cíncel

4000-R2
Módulo caucho #2, Cono

4010-S1
Instrumento completo (4000-AH + S1)

4010-S2
Instrumento completo (4000-AH + S2)

4010-S3
Instrumento completo (4000-AH + S3)

4010-R1
Instrumento completo (4000-AH + R1)

4010-R2
Instrumento completo (4000-H + R2)

Modulable, comfortable e innovador

Todos estos instrumentos han sido desarrollados de forma específica para modelar los composites foto-polimerizables. Los primeros tres módulos son espátulas realizadas en acero inoxidable «elástico»; los dos módulos siguientes son de caucho sintético, cuya enorme ventaja es tener una «adherencia cero» con el composite.

Los módulos Composite Instruments son parte integrante del programa «Instrument by Smile Line» y son compatibles con todos los mangos presentados en las páginas 6 y 7.



14070
Set de 5 instrumentos para composites, mangos en aluminio anodizado negro, microfibra

MOLDES SILICONA

N-ARCHITECT POSTERIOIRS / ANTERIORS

Fabricados en silicona transparente, estos moldes le permiten hacer fácilmente y muy rápidamente sus propias carillas de cera o composite.

El surtido **ANTERIOR** consta de tres formas superiores y una forma inferior, en dos tamaños cada una de ellas, con un total de 8 moldes.


El surtido **POSTERIOR** se compone de dos juegos más grandes y dos tamaños más pequeños. Muy útiles para realizar encerados de diagnóstico y para cualquier caso de cerámica prensada



2111
New Architect, set de 8 moldes anteriores en silicona



2121
New Architect, set de 4 moldes posteriores en silicona

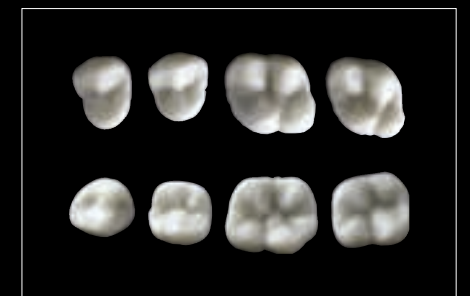

WAX INSTRUMENT SET

INSTRUMENT BY SMILE LINE

Tradición, calidad, **fabricación exclusivamente suiza y europea**. Los instrumentos Smile Line para cera simbolizan lo que es mejor en este ámbito. Un set de instrumentos que, una vez adquirido, os acompañará numerosos años.

Nota: todos los módulos presentados en estas páginas son compatibles naturalmente con los mangos presentados en las páginas 6 y 7.

Respeto de las tradiciones con la más alta calidad



4000-SC Módulo bisturí estándar
4000-D Módulo Lección
4000-E Módulo Zahle, cuchillo
4000-F Módulo Zahle, espátula
4000-G Módulo Cuchara corta
4000-H Módulo Hollenback de 1/2
4000-I Módulo PK Thomas
4000-J Módulo Aguja

4010-SC
 Instrumento completo con mango 4000-AH



4000-S Módulo Beale, espátula
4000-T Módulo Beale, punta



4000-U
 Módulo martillo

No incluido en el set.



14060-N
 Set de 10 instrumentos para cera, mango aluminio anodizado, micro-fibra

CERA HIGH PRECISION

calidad, fiabilidad y confort de trabajo



2150
 Cera blanca ADD-ON, 30g



2151
 Cera POSITION, 30g



2160
 High Precision Margin wax, roja, 30g



2161
 High Precision Inlay wax, verde claro, 30g



2162
 High Precision Modelling wax, verde intenso, 30g

High Precision ADD-ON Wax

Una cera 100% orgánica estudiada expresamente para fabricar vuestras carillas en los moldes de silicona. Calentando ligeramente una carilla realizada con esta cera, podréis adaptar su forma sin riesgo que se rompa.

High Precision POSITION Wax

Esta cera totalmente orgánica es blanda y fácil de pegar y os permite fijar los elementos de cera, como las carillas o las caras oclusales que habréis fabricado en los moldes de silicona.

High Precision Margin Wax

Es una cera con características superiores para modelar todas las partes marginales (cofias e inlays). Esta cera se distingue por su casi inexistente retracción.

High Precision Inlay Wax

Cera de modelar dura para superficies oclusales e inlays, increíblemente fácil para retocar. Sus calidades son tales, que también está indicada para realizar fresados perfectamente. La superficie que se obtiene después de colar o pensar es extremadamente lisa.

High Precision Modelling Wax

Cera universal dura para modelar (cofias, inlays), con muy poca retracción. Calcina sin dejar residuos y es muy cómoda para modelar.

Todas las ceras Smile Line High Precisión Waxes son 100% orgánicas.

ACCESORIOS IMPLANTOLOGÍA

SMILELINE 2019



Confort y ergonomía



IMPLANT DRIVERS

DESTORNILLADORES PARA IMPLANTES, PARA LABORATORIO

SMILELINE 2019



Destornillador compatible Nobel Biocare¹

4000-NOB punta destornillador
4010-NOB destornillador completo
4000-L-NOB punta destornillador, larga
4010-L-NOB destornillador completo, largo

Destornillador compatible Straumann¹

4000-STR punta destornillador
4010-STR destornillador completo
4000-L-STR punta destornillador, larga
4010-L-STR destornillador completo, largo

Destornillador compatible Astra Tech¹

4000-AST punta destornillador
4010-AST destornillador completo
4000-L-AST punta destornillador, larga
4010-L-AST destornillador completo largo

Destornillador compatible Friadent¹

4000-FRI punta destornillador
4010-FRI destornillador completo
4000-L-FRI punta destornillador, larga
4010-L-FRI destornillador completo, largo



Destornillador compatible 3i¹

4000-iii-HX punta destornillador
4010-iii-HX destornillador completo
4000-L-iii-HX punta destornillador, larga
4010-L-iii-HX destornillador completo, largo
 Disponible también con cabeza cuadrada: sustituir HX por SQ en el número de artículo

Destornillador compatible Camlog¹


4000-CAM punta destornillador
4010-CAM destornillador completo
4000-L-CAM punta destornillador, larga
4010-L-CAM destornillador completo, largo

Destornillador compatible Ankylos¹¹

4000-ANK punta destornillador
4010-ANK destornillador completo
4000-L-ANK punta destornillador, larga
4010-L-ANK destornillador completo largo

Destornillador compatible SPI¹

4000-SPI punta destornillador
4010-SPI destornillador completo
4000-L-SPI punta destornillador, larga
4010-L-SPI destornillador completo, largo

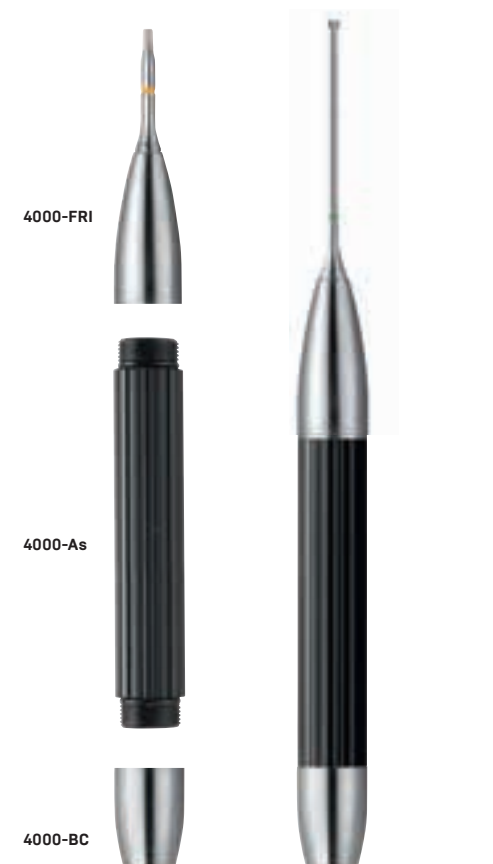

4010-L-STR
destornillador completo, largo

El set de destornilladores para implantes de Smile Line se ha convertido en **un accesorio indispensable** en muchos laboratorios dentales.

El set contiene 8 modelos de destornilladores, compatibles con los sistemas de implantes más comunes en el mercado: Nobel Biocare, Straumann, Astra Tech, 3i, Camlog, SPI, Ankylos, Friadent¹.

Interesa saber que en la mayoría de los casos, cuando un sistema de implantes no se encuentre entre los del set, será compatible con uno de los 8 destornilladores propuestos.

Los destornilladores del set «Station» tienen la longitud estándar, pero es posible pedir cada instrumento o parte del instrumento individualmente y por lo tanto tener la posibilidad de conseguir cada destornillador en versión «punta larga».

Descripción	Art. n°
Implant Drivers Station, set completo con 8 destornilladores (longitud estándar) y un soporte de aluminio macizo anodizado (Station), color natural	4300
Soporte de aluminio macizo anodizado (Station), color natural, sólo	4301
Soporte de aluminio macizo anodizado (Station), color negro, sólo	4302



¹Nobel Biocare, Straumann, Astra Tech, 3i, Camlog, SPI, Ankylos, Friadent todas son marcas registradas.

SIDEKICK

DESTORNILLADORES CLÍNICOS DE IMPLANTES

SMILELINE 2019



Destornillador compatible Nobel Biocare¹

D-400-NOB-S, 8 mm
D-400-NOB-M, 13 mm
D-400-NOB-L, 25 mm

Destornillador compatible Straumann¹

D-400-STR-S, 8 mm
D-400-STR-M, 13 mm
D-400-STR-L, 25 mm

Destornillador compatible Astra Tech¹

D-400-AST-S, 8 mm
D-400-AST-M, 13 mm
D-400-AST-L, 25 mm



Destornillador compatible Friadent¹

D-400-FRI-S, 8 mm
D-400-FRI-M, 13 mm
D-400-FRI-L, 25 mm

Destornillador compatible 3i¹

D-400-iii-S, 8 mm
D-400-iii-M, 13 mm
D-400-iii-L, 25 mm

Destornillador compatible Camlog¹

D-400-CAM-S, 8 mm
D-400-CAM-M, 13 mm
D-400-CAM-L, 25 mm



Destornillador compatible Ankylos¹


D-400-ANK-S, 8 mm
D-400-ANK-M, 13 mm
D-400-ANK-L, 25 mm

Destornillador compatible SPI¹

D-400-SPI-S, 8 mm
D-400-SPI-M, 13 mm
D-400-SPI-L, 25 mm

Destornillador plano 1.4 mm

D-400-1.4-S, 8 mm
D-400-1.4-M, 13 mm
D-400-1.4-L, 25 mm

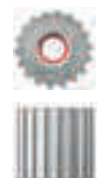

D-401
Cabeza destornillador

El juego de destornilladores para implantología Sidekick contiene 9 modelos (cada uno disponible en 3 longitudes) compatibles con los sistemas de implantes más populares en el mercado. El objetivo es que usted tenga **a su disposición en cualquier momento EL modelo que necesita inmediatamente.**

Dada la amplia gama de geometrías disponibles, en un 99% de los casos encontrará un modelo compatible con las diferentes marcas de implantes.

Un ingenioso mecanismo permite anclar las puntas de los destornilladores en el instrumento con un diseño fácil y muy compacto.

Para completar el concepto, Smile Line ha creado una pinza de sujeción cuya huella se corresponde con el perfil de la cabeza del destornillador para los casos de tuerca extremo o difíciles de desatornillar. Su uso es muy cómodo, **con acceso lateral a la cabeza del tornillo** sin tener que quitarlo de su ubicación.

El kit de destornilladores para implantes Smile Line está disponible en dos versiones: el modelo «básico» con una longitud estándar de mango para cada marca (9) o modelo «Maestro» que incluye los 9 modelos en las 3 longitudes (27).

También puede crear su kit personalizado: cada componente está disponible individualmente.

¹Nobel Biocare, Straumann, Astra Tech, 3i, Camlog, SPI, Ankylos, Friadent todas son marcas registradas.



Eficaz, confortable y ergonómico



Descripción	Art. nº
Sidekick, Kit destornilladores implantes Basic: 9 destornilladores 13 mm, 1 cabeza perfilada, 1 caja de aluminio	D-430-Basic
Sidekick, Kit destornilladores implantes Máster: 27 destornilladores 8-13-25 mm, 1 cabeza perfilada, 1 caja de aluminio	D-430-Master
Sidekick, Caja de aluminio vacía para destornilladores implantes	D-499
O'ring de sustitución para cabeza (5 pzas)	D-403

PINZA DE SUJECIÓN SIDEKICK

Su huella se corresponde con el perfil de la cabeza del destornillador y permite un acceso y una presión lateral. ¡ En otros términos, mayor comodidad y ergonomía!



D-402
Pinza de sujeción



LLAVE DINAMOMÉTRICA Ajustable 15 / 20 / 25 / 35 Ncm

escala 1:1



D-490
Llave dinamométrica

escala 1:1



D-491
Adaptador para llave dinamométrica

Gracias a su adaptador (#D-491), esta llave dinamométrica es compatible con todas las puntas de destornilladores Sidekick.

Nota: Los poseedores de una llave dinamométrica original Straumann necesitarán sólo el adaptador D-491 para poder utilizar todas las puntas Sidekick.

TOMA DE COLOR Y FOTOGRAFÍA

SMILELINE 2019



Must have



SMILE LITE

TOMA DE COLOR POR EL ESPECIALISTA

Sin las herramientas adecuadas, la toma de color puede ser una fuente de fracasos y malentendidos mientras se realizan restauraciones estéticas. Existen un sin fin de factores que pueden influenciar de forma negativa la percepción del color, como la luz ambiente (intensidad y tipo de luz), el entorno operativo, así como factores humanos como la fatiga y el estrés.

Smile Lite es una herramienta revolucionaria que aporta fiabilidad, simplicidad y eficiencia— **reduciendo drásticamente el riesgo de cometer errores durante la toma de color.**

Equipada con LEDs (Diodos Emisores de Luz) calibrados a una temperatura de la luz de 5500°K (equivalente a la luz natural), Smile Lite produce luz natural, neutral, estable y fiable en cualquier momento del día sin importar las condiciones de luz del exterior (nublado o soleado).

Smile Lite posee una batería Li-Ion y se puede recargar fácilmente a través del cable mini-USB (cable y adaptador se suministran con la lámpara).

La calidad de la luz de Smile Lite permite **distinguir fiablemente y fácilmente la tonalidad, el valor y el croma de los dientes** y también permite que la estructura interna de los dientes sea más evidente.

La apertura rectangular a través de la cual se realiza la toma de color delimita precisamente la zona de trabajo y elimina posibles fuentes de distracción al usuario.



SMILELINE 2019

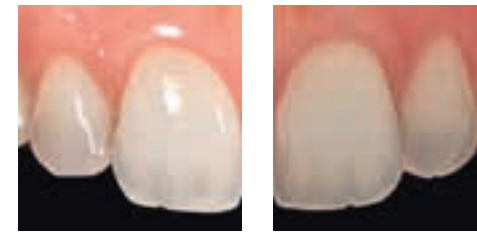


Foto sin filtro

Foto con filtro Style Lense



Observe los dientes como nunca antes se habían visto hasta ahora, « En vivo »!

Inspirados por el trabajo de grandes clínicos y ponentes- entre ellos L.Vanini (1996) y S. Papazoglou (2006), junto con Styleitaliano (un grupo de clínicos e investigadores apasionados por la estética www.styleitaliano.org), hemos desarrollado un filtro polarizador fácilmente adaptable a la Smile Lite para la polarización « en vivo ».

Este sorprendente filtro elimina los reflejos no deseados (especulares y difusos) y permite al usuario **observar los dientes de una forma completamente diferente y nueva**: mejor apreciación del color, mejor comprensión de las transparencias del diente y realiza los más pequeños detalles.

Alternando la observación de los dientes con y sin filtro, vuestro trabajo se vuelve más fácil y claro.

El filtro Style Lense está equipado con botones magnéticos que permiten colocarlo y quitarlo de una manera muy sencilla y está incluido en el set de Smile Lite.

Descripción	Art. nº
Smile Lite, set completo con filtro Style Lense	6500
Filtro polarizador Style Lense	6510

SMILE LITE MDP

MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

El Smile Lite MDP es un dispositivo «plug and play», muy fácil de usar y que no necesita ninguna App particular, ningún proceso de calibración ni ninguna formación específica. Os permitirá utilizar completamente todo el potencial de la cámara de vuestro smartphone con toda sencillez, y se convertirá rápidamente en un instrumento indispensable para:

- Fotografías para la toma de color
- Comunicación diaria con el laboratorio
- Breves video clips
- Documentación de los pacientes
- Fotografías artísticas



6600
Smile Lite MDP

El Smile Lite MDP puede considerarse un «mini estudio fotográfico». Está equipado con tres grupos de LED (iodos emisores de luz): cada grupo se puede encender de forma independiente y también se puede regular la potencia de iluminación de cada uno con cuatro niveles diferentes.







En la parte posterior de su Smile Lite MDP hay un adaptador universal ajustable que le permite ajustar cualquier modelo de teléfono inteligente con un ancho de entre 55 y 85 mm.



Adaptador universal
Longitud 55-85 mm

Las diferentes iluminaciones

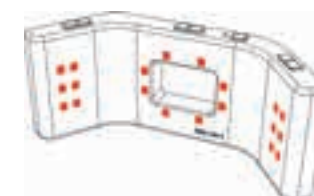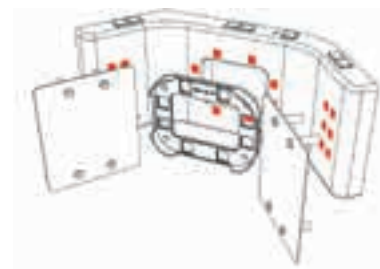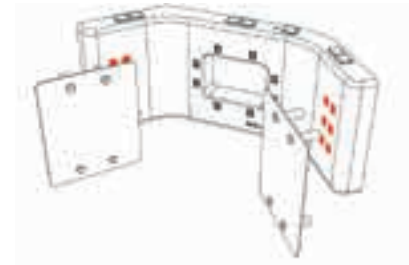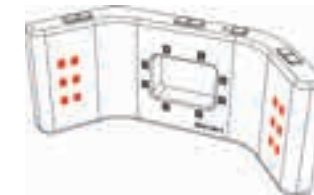

...y los resultados



Imágenes no retocadas realizadas con smartphone + Smile Lite MDP + contrastador Flexipalette.

MENSAJE DEL INVENTOR

Estimados colegas, queridos usuarios del Smile Lite MDP,

Después de casi 5 años de experimentos y pruebas con teléfonos inteligentes para fotografía dental, tuve la oportunidad de comenzar en 2014, con el grupo global Styleitaliano, el desarrollo del MDP Smile Lite en colaboración con la empresa suiza Smile Line SA.

Es una alegría para mí presentarles una herramienta cuyo desarrollo ha sido 100% dedicado a la fotografía dental con teléfonos inteligentes (MDP = fotografía dental móvil).

Smile Lite MDP es una revolución para la fotografía dental gracias a la facilidad de uso, la calidad profesional de los resultados obtenidos además de por el aspecto económico.

Actualmente, mi opinión es que cada profesional debe tomar fotografías ya que los beneficios son numerosos: comunicación optimizada con el paciente pero también con el laboratorio, y especialmente, muy importante, para documentar sus casos.

Paralelamente a la fotografía tradicional que utiliza máquinas reflex digitales (DSLR), MDP de Smile Line se puede describir como un mini estudio fotográfico que cubre varias necesidades:

- un flash anular
- flashes laterales (flash dual)
- fotografía con difusores (softbox)
- fotografía con filtro polarizador
- fotografía con difusores y filtro polarizador al mismo tiempo
- realizar videos dentales

Llamo la atención de todos/as sobre el hecho de que la fotografía es una técnica muy amplia y que es complejo establecer una regla precisa sobre la mejor manera de proceder. Por eso los cursos de fotografía profesional se están incrementando en todas partes.

Los mejores resultados se obtendrán con experiencia, paciencia y pruebas. Les invito a ser curiosos, divertirse jugando con la sombra y la luz y descubrir las fenomenales posibilidades de las cámaras de los teléfonos inteligentes actuales.

Le deseamos mucha diversión y placer con Smile Lite MDP!

Atentamente,

Prof. Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD
Head Of Department Restorative and
Esthetic Dentistry
Universidad Saint-Joseph, Beirut, Líbano



Imágenes no retocadas tomadas con smartphones + Smile Lite MDP

SMILELINE 2019

DIFUSORES LATERALES (2 PZAS)

Ideales para suavizar la luz y resaltar la textura superficial.



6610
Difusores laterales

FILTRO POLARIZADOR

Elimina los reflejos de los dientes y permite determinar el valor en la selección de color. Ayuda también a ver las caracterizaciones bajo la capa del esmalte.



6620
Filtro polarizador

BRAZO FLEXIBLE

Una ventaja enorme para los profesionales que desean realizar vídeos. La pinza se fija fácilmente sobre el borde de una mesa o sobre un tubo redondo.



6630
Brazo flexible

MONOPOD

Permite una estabilidad más grande durante la toma de fotografías.



6640
Monopod

HARD CASE

La protección ideal durante vuestros viajes con Smile Lite MDP.



6699
Hard Case


FLEXIPALETTE

En colaboración con «Styleitaliano», un grupo de estudio de dentistas e investigadores apasionados en la odontología estética, Smile Line introduce en el mercado un surtido de contrastadores (fondos negros) destinados a la fotografía intraoral: Flexipalette.

Las Flexipalettes están hechas de una lámina de cobre flexible revestida con PlastiMed, una silicona negra de grado médico, sin látex, hipoalérgica, completamente segura.

- Flexipalette se puede esterilizar en autoclave a 135°C
- Flexipalette es totalmente opaca y sin reflexión de luz
- Flexipalette tiene una superficie suave al tacto y agradable en boca
- Flexipalette puede ser moldeada de 30° hasta 45° para obtener más ergonomía

En la web de Smile Line encontrará un breve vídeo que muestra el uso de Flexipalette y sus indiscutibles ventajas.

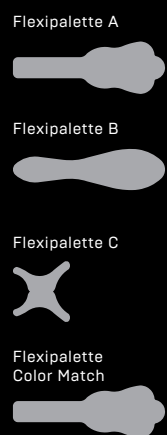

Con Flexipalette

Sin Flexipalette

Un «must» para la fotografía intraoral



Descripción	Art. nº
Flexipalette, set de 4 formas	FP-3100
Flexipalette Forma A	FP-3001
Flexipalette Forma B	FP-3002
Flexipalette Forma C	FP-3003
Flexipalette Color Match	FP-3004



PHOTOCAD

NUEVA GENERACIÓN DE RETRACTORES



PC-3001
Photo-CAD LOW

PC-3002
Photo-CAD UP
(2 pzas)

El diseño innovador de los retractoros Photo-CAD permite obtener los mejores resultados con fotografías en los 4 cuadrantes y durante impresiones digitales con los sistemas CAD CAM.

Photo-CAD se puede doblar ergonómicamente y adaptarlo a la boca del paciente y a las necesidades del fotógrafo. Tienen una superficie suave para mayor confort de los pacientes. **El material es opaco, no refleja la luz** y obviamente puede ser esterilizado.

Photo-CAD LOW es una herramienta única que permite retraer en una sola acción tanto la mejilla como la lengua durante la imagen «oclusal» de un cuadrante inferior.

Photo-CAD UP es un retractor que puede ser utilizado de manera universal. Cuando se usa para fotografía dental, sirve para retraer los tejidos blandos vestibulares en el área de pre-molar superior/molar durante la captura de imágenes. Es de gran ayuda también durante impresiones digitales para sistemas CAD-CAM.

Descripción	Art. nº
Photo-CAD, set de 3 unidades	PC-3100


MY SHADE GUIDE

Las guías de colores provistas por la industria son utilizadas universalmente, aunque todos están de acuerdo que a menudo falta fidelidad con los productos suministrados.

El objetivo que persigue Smile Line con la creación de **My Shade Guide**, es ofrecer la posibilidad de **fabricar su propia guía de colores personalizada** basada en su realidad. El set contiene un molde en caucho sintético, el aislante y todos los pequeños soportes, sticks, clips, y por supuesto la base de aluminio.

My Shade Guide también está disponible en una versión para crear guías de colores de composite (molde específico). Todas la informaciones en www.smileline.ch

Creación de una guía de colores personalizada

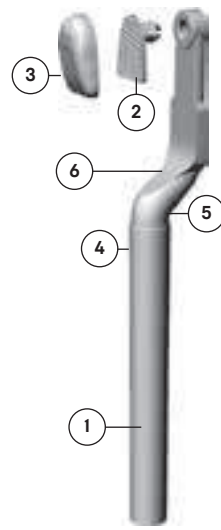

- 1 Stick
- 2 Clip
- 3 Muestra cerámica
- 4 Zona de fricción
- 5 Diseño anatómico
- 6 Superficie para marcar

SMILELINE 2019


SAMPLER

Esta herramienta muy precisa le permite producir muestras de porcelana o composite del grosor deseado, muy fácil y rápidamente. Es también extremadamente útil para **sus mezclas personales y las pruebas de cocción** (prueba de una nueva cerámica, de su horno, etc.).

Los dispensadores para porcelana le permiten tomar el volumen exacto de masa precisa. Es esencial para las mediciones correctas. Las porciones tomadas son de 50-25 y 5-1 mm³, dependiendo del instrumento elegido.

Las placas de soporte negras están hechas de un material laminado que le posibilita pegar y relacionar todas sus pastillas para una personalización completa.

Producción de muestras cerámica y composite

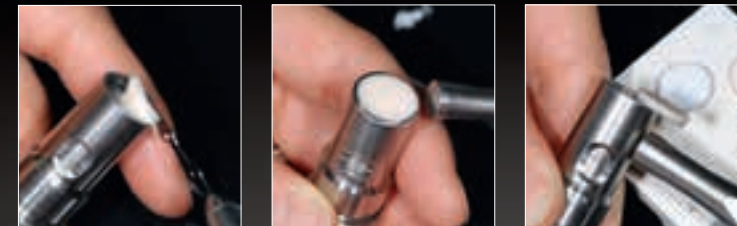

Descripción	Art. n°
My Shade Guide, kit completo: base aluminio con tapa, 5 plaquetas soporte, 25 sticks & clips, 1 molde de caucho sintético, 1 aislante cerámica (8 ml), 2 plaquetas de vidrio, 2 láminas extra finas	7500-N

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SMILELINE.CH

Descripción	Art. n°
Kit completo, incl. porcionadores de porcelana 50-25 y 5-1, tabla para listar	7010
Sampler sólo	7015
Tabla para listar (5 pzas)	7016
Porcionador 50-25	4010-A
Porcionador 5-1	4010-B

ACCESORIOS

SMILELINE 2019



Eficacia – productividad



PINZA «IMPLANT BASE HOLDER»

Haz tu vida fácil

El diseño de las extremidades de esta nueva pinza es muy innovador: dos mordazas en forma de media luna forman un cilindro de 1.4 mm de diámetro con apoyo a 90° cuando la pinza está cerrada.

1. insertar la extremidad de la pinza en la base del implante.
2. cerrar la pinza: las mordazas se apartan y crean una tensión en el interior de la base implante, manteniéndola firmemente.

« Implant base holder » es muy práctica y confortable para la limpieza de los componentes con vapor. La herramienta aporta también una ventaja enorme para la operación de colocación de la corona sobre la base: según las instrucciones del fabricante, mantener la presión durante algunos segundos y dejar posar.

Gracias al anillo « distanciador », el trabajo no estará jamás en contacto con la superficie de la mesa durante el tiempo de fraguado.

« Implant base holder » permite trabajar rápidamente, confortablemente y con total seguridad.



SMILELINE 2019

8800
Pinza « Implant
base holder »



UNITED COLORS OF D. VINCI

Identificación clara
de las masas durante
el montaje

Una muy pequeña porción mezclada con la cerámica confiere a esta última un color intenso y luminoso. Atribuyendo un color diferente a cada masa que se utiliza, **la visualización del posicionamiento de cada una de ellas es extremadamente preciso y confortable.**

Gracias a su consistencia plástica, estos colorantes fluorescentes impiden que las diferentes masas cerámicas se mezclen entre ellas. United Colors of D.Vinci se calcina sin dejar residuos y sin contaminar la cerámica.

Atención: Es importante aumentar el tiempo de secado. Los colorantes son concentrados y no deben ser usados puros – Ver el video en www.smileline.ch



5200-Asst
United Colors of D. Vinci, 7 botellas de 10 ml



MICRO-VIBES 2


El Micro-vibes es una herramienta vibratoria con cabeza intercambiable, del tamaño de un bolígrafo. En términos de rapidez y calidad de trabajo, se revela mucho más eficaz que un pincel para la aplicación de diversos materiales en pasta.

Estos últimos años, las técnicas de maquillaje para cerámica se han sofisticado mucho con la llegada de materiales fresados muy eficaces. El Micro-Vibes, utilizado con la punta doble, no tiene competidor en términos de eficiencia, precisión y comodidad de trabajo. ¡ Permite aplicar la masa de glaseado o textura muy uniformemente, después los maillajes, con extrema precisión...en una sola cocción!

La espátula hecha de material sintético es muy útil para mezclar masas cerámicas (dar homogeneidad - extraer burbujas de aire) así como para mezclar / activar los maillajes en su frasco o en la celda de la placa de mezclas.

No tenemos ninguna duda de que, gracias a su imaginación, encontrará muchas otras aplicaciones para su Micro-Vibes:

- Opaquer en pasta
- Liners
- Puesta en revestimiento
- Cierre de fugas durante la carga de cerámica

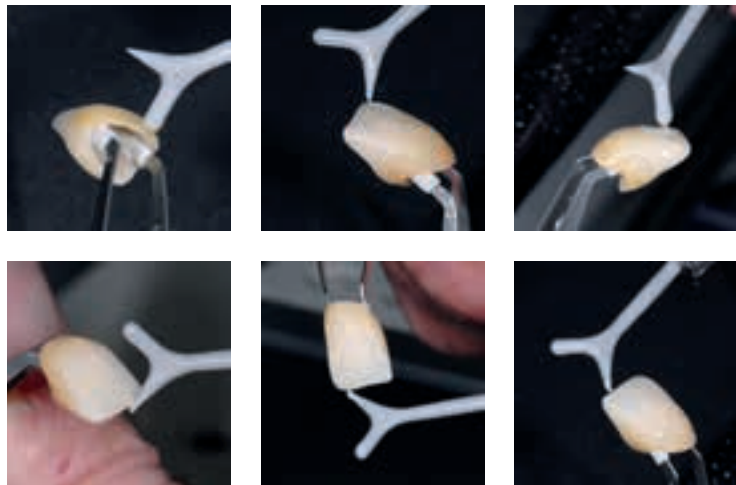

SMILELINE 2019




Ergonómico
Nuevo mandril:
cambio de herramienta
muy rápido.

Eficiencia / precisión
Nuevo mando que
presionándolo permite
trabajar con ligeros toques



Good vibes
... para sus
composites también!

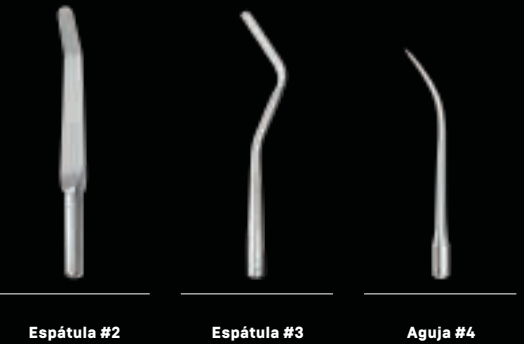

El Micro-Vibes se ha revelado muy eficaz para el trabajo de composites al optimizar las propiedades tixotrópicas de este último.

- Mejor adaptación del composite
- Textura menos pegajosa pues hay menos burbujas de aire
- Mejor control de los espesores de material
- Aplicación más precisa

Las puntas para modelado del composite expuestas más arriba no forman parte del set Micro-Vibes 2 de base y se piden por separado, en conjunto de 3 puntas o cada modelo individualmente.

Descripción	Art. nº
Micro-Vibes 2, Set de 3 pointes pour modelage composites	02100-MV2
Spatule #2	02102-MV2
Spatule #3	02103-MV2
Aiguille #4	02104-MV2

Descripción	Art. nº
Micro-Vibes 2, set completo: Micro-Vibes, 1 punta doble, 1 espátula, 1 pila AAAA	02000-MV2
Pilas 1.5V - AAAA, 2 pcs	01030-MV
Módulo completo micro-motor	02200-MV2




GOLDEN SECTION DIVIDER

La proporción de oro es una relación cuyo resultado es llamado matemáticamente Phi (1.618) o phi (0.618). Está probado que **el universo usa esta proporción para su propia construcción**, desde las secuencias genéticas hasta al nivel de las galaxias, pasando por la construcción de flores, insectos, una mano, una cara o todo el cuerpo.


Del mismo modo que somos capaces de dividir una línea por la mitad o pintar una línea perpendicular, todos reconocemos la Proporción de Oro como una constante para la armonía y el equilibrio.



Descripción	Art. n°
Divisor Proporción Aurea, completo con 6 bloques preimpresos e instrucciones de uso	6010

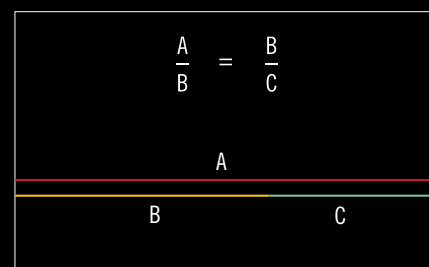

Divisor para proporción de oro

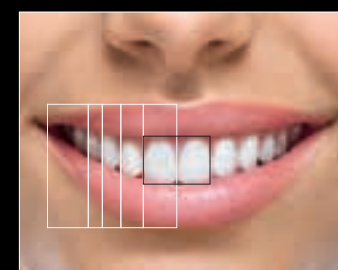

UNA HERRAMIENTA FASCINANTE

El Golden Section Divider **le permitirá fácilmente asimilar « físicamente » el concepto**. Ligera o ampliamente abierto, el Divisor Golden Section indica siempre dos segmentos respetando la proporción de oro. Fabricado de acero inoxidable de la más alta calidad y muy cuidadosamente ensamblado a mano, es una maravilla de la precisión mecánica. Se suministra junto con un surtido muy útil de bloques cuadrículados y con instrucciones de uso.



LA PROPORCIÓN DE ORO EN ODONTOLOGIA

Numerosos estudios demuestran que la proporción de oro está presente en la armonía de una sonrisa y dentición. (Vea la imágenes abajo). El Divisor Golden Section y los bloques cuadrículados le permiten descubrir en unos pocos segundos la meta teórica ideal en comparación con la situación real en boca. Estas informaciones son muy interesantes y muy útiles para:

- casos estéticos
- prótesis totales
- posicionamiento del ángulo-eje de los dientes
- control de encerados
- gingivectomia



Los bloques cuadrículados « Golden Section Grids » (suministrados también en el kit) son muy útiles para registros en la boca del paciente así como para trabajar con modelo.

VENEER ME

Gracias a veneerME usted podrá transportar y manipular sus delicadas carillas (veneers) con las mayores condiciones de seguridad.

Máxima seguridad para sus Veneers



Descripción	Art. nº
veneersME, 3 kits/cajas completos, 3 discos/gel de repuesto y 3 marcos de membrana de repuesto	2600
veneersME, discos/gel de repuesto (10 pzás)	2610
veneersME, marco de membrana de repuesto (10 pzás)	2620
veneersME Mini-set, 1 set completo, 1 disco/gel de repuesto y 1 marco de membrana de repuesto	2600-1

SMILELINE 2019


El pegamento es de gel de poliuretano

La base veneerME está recubierta con un disco de gel adhesivo de poliuretano. Las veneers se apoyan por el lado vestibular y se adhieren sin problema. Todos los trabajos de preparación (grabado ácido, silanización, etc) se pueden realizar en esta posición **sin temor a caídas o roturas**. El material es duradero y puede ser utilizado repetidamente (fácilmente sustituible).

Tapa con membrana

Cuando las veneers están sobre la plataforma, la tapa con membrana se fija sobre la base para mayor seguridad. **Una membrana sumamente fina que se adapta delicadamente y totalmente a la forma de las veneers** y contribuye a su estabilidad. Sólo falta cerrar la tapa y su trabajo está listo para ser enviado.

Una ventaja inmensa: la membrana es permeable! En otras palabras, el usuario puede lavar y secar la membrana después de haberla sacada del marco. De esta manera se puede trabajar en las mejores condiciones posibles de seguridad. La membrana está hecha de nylon y puede reemplazarse, si fuera necesario, después de algunas aplicaciones

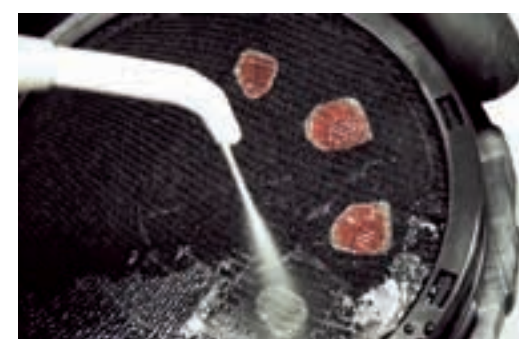

HOLDING GEL

Gel para fijación temporal

FACILIDAD DE USO

Una pequeña gota en el troquel es suficiente para sostener temporalmente – sus delicadas carillas así como sus restauraciones totalmente cerámicas en el modelo. Este gel es esencial para **chequear los puntos de contacto, ajustes con masas correctoras, para chequear trabajos con su antagonista** o cualquier trabajo que precise comodidad y seguridad.

Transparente, no altera la tonalidad y además se disuelve completamente en agua. No deja ningún residuo después de las cocciones.



Descripción	Art. nº
Holding gel, 2x 6 ml	5110



ZIR. CARE

Desde el primer minuto en que utilice Zir.Care, descubrirá nuevas sensaciones: **eficacia, suavidad, comodidad** como nunca antes había podido sentir. Instrumento rotatorio de referencia para trabajar el Zirconio, Zir. Care es extremadamente eficaz también para trabajar la cerámica de recubrimiento. Igualmente con total suavidad y finura.

Zir.Care no ha surgido por los canales habituales del sector dental, sino que ha sido objeto de un desarrollo específico y exclusivo en colaboración con Smile Line.

- **formidable eficacia de acabado**
- **granulometría fina**
- **recalentamiento mínimo**
- **bajo desgaste**
- **eficaz con zirconio y con cerámicas**

Piedras diamantadas para zirconio



ZC-20L

Piedra para zirconio
forma medio-cono,
20 x 2 mm

ZC-20W

Piedra para zirconio
forma redonda,
20 x 4 mm

ZC-12WS

Piedra para zirconio
forma redonda,
12 x 2 mm

Descripción

Zir.Care, kit de 3 piedras para zirconio y 1 piedra para limpiar

Zir.Care, Cleaner, piedra para limpiar


Art. nº

ZC-00-asst

ZC-cleaner

SMILELINE 2019

ORGAN. EZ

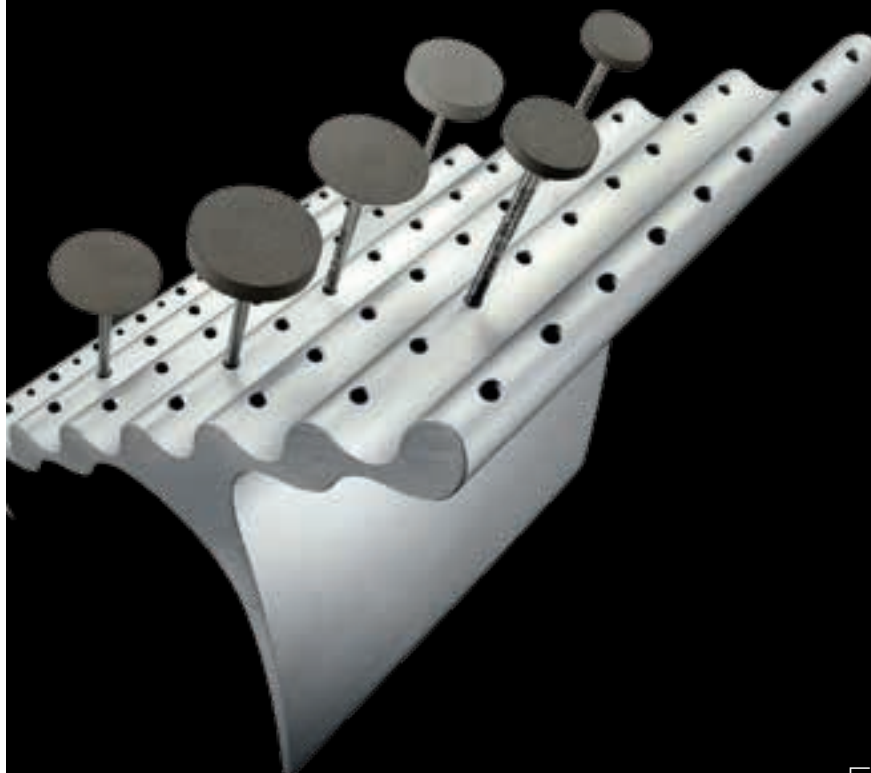

Fresero de aluminio macizo

A primera vista, algunos verán una escultura colocada en la mesa de trabajo. No se deje engañar: ORGAN.EZ es primero y sobre todo un fresero extremadamente útil y ergonómico.

ORGAN.EZ le permite **organizar sistemáticamente** sus fresas, diamantadas, pulidores con un simple objetivo: saber instantáneamente donde encontrarlas en vez de tener que buscarlas.

Fabricado en **aluminio macizo**, ORGAN.EZ es totalmente estable donde usted lo coloque. Para un máximo confort retirando o colocando las fresas, la entrada de cada orificio tiene un ligero ángulo.

Pueden ser colocados un máximo de 63 instrumentos con un vástago de 2.35 mm. En el primer nivel, usted encontrará 8 orificios adicionales pensados para colocar fresas de turbina.



8100
Organ.ez,
fresero en
aluminio macizo

CENTRO DE FORMACIÓN

Formación, encuentros,
intercambios

Gracias al éxito de Smile Line en los mercados internacionales y para poder seguir trabajando en las mejores condiciones posibles, ha sido necesario una ampliación de nuestros locales.

Ha sido para nosotros la ocasión de realizar un proyecto que era un sueño desde hacía muchos años: la creación de un centro de formación completamente equipado. 14 puestos de trabajo alrededor de una enorme mesa de 6 x 2 metros, instrumental de vanguardia... todo disponible para formaciones de alto nivel.

¡Este espacio ha sido creado para vosotros! Esperamos tener muy pronto el gusto de daros la bienvenida.



Smile Line ☺

made in switzerland

Smile Line SA

ZI La Clief 5

PO Box 229

CH-2610 St-Imier · Switzerland

Tel. +41 32 944 22 44

Fax +41 32 944 22 45

mail@smileline.ch

www.smileline.ch

